

beurer

EM 50



CS	Menstrual relax	
	Návod k použití	2
SK	Menstrual relax	
	Návod k použití	28

CE 2460



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

K seznámení

Vážená zákaznice,

jsme rádi, že jste si vybrala výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu, péče o krásu i o dítě.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Co je EM 50 Menstrual Relax?

Křeče v podbříšku nebo silné menstruační bolesti se vyskytují u mnoha žen před menstruací i během ní. Mnoho žen navíc trpí navíc nemocemi, jako je například endometrióza, které způsobují bolesti v podbříšku. Často jsou bolesti tak silné, že si ženy toužebně přejí okamžitou pomoc. Inovativní po-

můčka Menstrual Relax je samolepicí přístroj TENS s funkcí zahřívání pro zmírnění menstruačních bolestí a bolestí způsobených endometriózou. Díky použité technologii TENS lze pomocí přístroje Menstrual Relax přesně ošetřit bolestivé místo. Přístroj Menstrual Relax má celkem 15 stupňů intenzity. Přístroj navíc nabízí kromě možnosti zmírnění bolestí příjemné zahřívání. Silikonová pomůčka Menstrual Relax v kvalitě odpovídající zdravotnickým normám a v elegantním designu je extrémně tenká a pružná a perfektně se přizpůsobí ošetřovanému místu na těle. Špičkový elektrický obvod zajišťuje energeticky efektivní ošetření vždy po dobu 20 minut (na 1 nabití baterie až 6 aplikací).

Menstrual Relax, bezpečná a jednoduchá metoda na zmírnění bolestí, nabízí uživateli zcela novou zkušenost při potírání bolestí v podbřišku.

Co je TENS a co dokáže?

Pod pojmem TENS, transkutánní elektrické nervové stimulace, rozumíme účinnou elektrickou stimulaci nervů přes kůži. TENS je klinicky prokázaná účinná metoda bez použití léků a při správné aplikaci bez vedlejších účinků, schválená k léčbě bolesti vznikající z určitých příčin – i k jednoduché samoléčbě. Efekt zmírnění nebo potlačení bolesti je mimo jiné dosažen eliminací přenosu bolesti do nervových vláken a zvýšením uvolňováním endorfinů v těle, které svým působením v centrální nervové soustavě zmírňují vnímání bolesti. Metoda je vědecky prokázána a lékařsky schválena.

Každý klinický obraz nemoci, pro kterou je vhodné použití přístroje TENS, je třeba projednat s ošetřujícím lékařem. Lékař vám rovněž poskytne informace o příslušných výhodách samoléčby pomocí TENS. Přístroj TENS byl klinicky testován a schválen pro použití při menstruačních bolestech a pro zmírnění bolestí při endometrióze.

Přístroje TENS fungují na základě přivedení elektrického proudu k místu bolesti přes kůži. Gelové polštářky slouží jako přenosné médium, které podléhá běžnému opotřebení. Jestliže již nedochází

k dostatečnému kontaktu přes gelové polštářky, je potřeba přístroj Menstrual Relax vyměnit, protože již na těle nedrží celou plochou. Jinak může dojít k podráždění kůže v důsledku zvýšené hustoty proudu v určité části.

1. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1× Menstrual Relax


2× samolepicí gelové polštářky

1× kabel USB-C





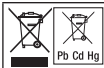


1× tento návod k použití






2. Vysvětlení symbolů



Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:



Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

	<p>VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví</p>
	<p>POZOR Přístroj může vysílat průměrné výstupní hodnoty 10 mA v intervalu po 5 sekundách.</p>
	<p>Upozornění Upozornění na důležité informace</p>
	<p>Výrobce</p>
	<p>Zplnomocněný zástupce v Evropské unii</p>
	<p>Příložná část typu BF</p>
	<p>Nepoužívejte, pokud máte implantované elektrické přístroje (např. kardiostimulátory).</p>

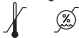	<p>Nepoužívejte v blízkosti srdce.</p>
	<p>Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.</p>
<p>IP 22</p>	<p>Ochrana proti vniknutí cizích těles $\geq 12,5$ mm a proti šikmo kapající vodě</p>
	<p>Datum ukončení použitelnosti</p>
	<p>Přečtěte si návod k použití.</p>
<p>Storage</p> 	<p>Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při skladování</p>
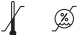
<p>Operating</p> 	<p>Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu</p>
	<p>Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.</p>

3. Použití v souladu s určením

Používejte přístroj Menstrual Relax výhradně:

- U člověka.
- K vlastnímu použití.
- K účelu, ke kterému byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné.
- K vnějšímu použití.
- Pro domácí a soukromé použití.
- S dodaným a doobjednatelným originálním příslušenstvím, jinak zaniká nárok na záruku. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.


4. Varovné a bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a léčbu. Konzultujte vždy proto nejdříve každý druh bolesti nebo nemoci se svým lékařem!

Abyste zabránili poškození zdraví, NEPOUŽÍVEJTE Menstrual Relax v níže uvedených případech:

- V případě implantovaných elektrických přístrojů (např. kardiostimulátory).
- V případě voperovaných kovových implantátů.
- Při používání inzulínové pumpy.
- Při vysoké horečce (např. $> 39^{\circ}\text{C}$).
- V případě známých nebo akutních poruch srdečního rytmu a jiných poruch stimulace a oběhových poruch srdce.
- Při záchvatových onemocněních (např. epilepsie).
- Během těhotenství.
- V případě onemocnění rakovinou.
- Po operacích, po nichž by zvýšené svalové kontrakce mohly narušit léčebný postup.
- V blízkosti srdce. Stimulační elektrody se nesmí používat na přední straně hrudního koše (oblast žebér a hrudní kosti), zejména ne na obou velkých prsních svalech. Zde by použití mohlo zvýšit riziko fibrilace srdečních komor a vyvolat zástavu srdce.
- Na lebce, v oblasti úst, hltanu nebo hrtanu.
- V oblasti krku / krční tepny.
- V oblasti genitálií.

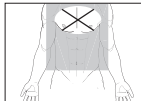

- Na kůži s akutním nebo chronickým onemocněním (poranění nebo zánět), např. při bolestivých i nebolestivých zánětech, zarudnutí, vyrážce (např. alergie), na popáleninách, pohmožděninách, otocích a otevřených nebo hojících se ranách, na hojících se operačních jizvách.
- V prostředí s vysokou vlhkostí, např. v koupelně nebo při koupání či sprchování.
- Po konzumaci alkoholu.
- Při současném připojení k jinému vysokofrekvenčnímu chirurgickému přístroji.
- Při akutních nebo chronických onemocněních žaludku a zažívacího traktu.

VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje se poradte se svým lékařem v případě:

- akutních onemocnění, zejména při podezření nebo diagnóze vysokého krevního tlaku, při poruchách srážlivosti krve, sklonu k tromboembolickým onemocněním a rovněž v případě výskytu zhoubných nádorů;
- všech kožních onemocnění nebo otevřených ran;
- nevyjasněných chronických bolestí, nezávisle na části těla;
- cukrovky;
- všech poruch senzibility se sníženým vnímáním bolesti (např. poruchy látkové výměny);
- současně probíhajícího lékařského ošetření;
- výskytu potíží při stimulační léčbě;
- trvalého podráždění kůže z důvodu dlouhodobé stimulace elektrodou na stejném místě.

VAROVÁNÍ

- Nenechávejte přístroj v dosahu dětí, abyste předešli případnému nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Přestane-li přístroj správně fungovat, dostaví-li se nevolnost nebo bolesti, okamžitě stimulaci přerušte.
- Před přiložením nebo odstraněním Menstrual Relax vypněte.
- V žádném případě Menstrual Relax neupravujte (např. seříznutím). Mohla by se tím zvýšit proudová hustota, což může být nebezpečné.
- Stimulaci provádějte v prvních minutách vsedě nebo vleže, abyste nebyli ve výjimečných případech vystaveni nebezpečí poranění z důvodu vagální reakce (pocit slabosti). Při pocitu slabosti přístroj okamžitě vypněte a podložte si nohy (cca 5–10 min.).
- Menstrual Relax nepoužívejte během spánku, při řízení motorového vozidla nebo obsluze strojů.
- Menstrual Relax nepoužívejte při činnostech, při kterých by mohla být nepředvídaná reakce (např. zvýšená svalová kontrakce navzdory nízké intenzitě) nebezpečná.
- Nepoužívejte tento přístroj současně s jinými přístroji, které do těla vysílají elektrické impulzy.
- Skutečná teplota přístroje Menstrual Relax se může lišit podle stavu kůže, věku, místa bolesti atd.
- Pokud byste při zahřívání pocítovali příliš velké teplo, ihned přerušte stimulaci. Ve stimulaci TENS můžete pokračovat bez funkce zahřívání.
- Po jídle počkejte alespoň hodinu, než začnete používat Menstrual Relax.
- Menstrual Relax nepoužívejte na mokré kůži, která omezuje lepicí schopnost gelových polštářků.

- Dbejte na to, aby se během stimulace nedostaly žádné kovové předměty, např. spony na páscích nebo náhrdelníky, do kontaktu s elektrodami. Jestliže máte v oblasti aplikace nějaký šperk nebo piercing (např. piercing v pupíku), musíte tyto předměty před použitím přístroje odstranit, jinak by mohlo dojít k bodovým popáleninám.
- Ošetření pokožky mastnými krémy nebo mastmi před stimulací se nedoporučuje.
- K upevnění přístroje Menstrual Relax nepoužívejte žádné lepicí pásky, obvazy nebo jiné pomocné prostředky kromě příslušných gelových polštářků. Jinak by nerovnoměrná přilnavost gelových polštářků mohla způsobit poranění pokožky.



VAROVÁNÍ

Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice k manipulaci s přístrojem.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.


- Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním přístroje zcela nabijte baterii (viz kapitola 6).
- Pro dosažení co nejdelší životnosti plně nabíjejte baterii minimálně každých 6 měsíců.

POZOR

- Chraňte přístroj před silnými nárazy.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže vykazuje závady nebo řádně nefunguje. V takovém případě se ihned obraťte na zákaznický servis.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí. Nikdy přístroj nekládejte do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných topných zařízení nebo těles, např. sušičky nebo pečicí trouby, a nepoužívejte ho v blízkosti (~1 m) krátkovlnných nebo mikrovlnných zařízení (např. mobilů), neboť by mohly vzniknout nepříjemné proudové rázy.
- V případě pochybností poškozený přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedený zákaznický servis.
- Okamžitě přístroj vypněte, pokud je poškozený nebo objeví-li se nějaká porucha.
- V žádném případě se nepokoušejte přístroj otevřít a/nebo opravit sami.
- Opravy nechte provádět pouze v zákaznickém servisu nebo u autorizovaného prodejce. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

5. Popis přístroje

1. Zvýšení intenzity
2. LED kontrolka zahřívání/
nabíjení
3. LED kontrolka TENS
4. Vypínač
5. Snížení intenzity
6. Hřejivá plocha
7. Pravá elektroda
8. Přípojka USB-C
9. Levá elektroda

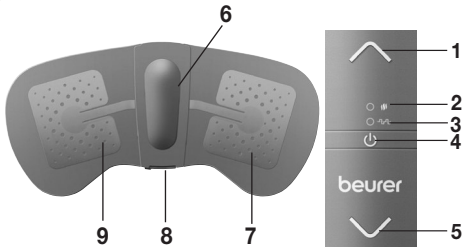

6. Uvedení do provozu

Nabíjení baterie


i Upozornění

Než začnete používat přístroj Menstrual Relax, musíte ho alespoň 2 hodiny nabíjet. Postupujte takto:

1. Otevřete kryt přípojky USB-C na přístroji Menstrual Relax.
2. Dodávaný nabíjecí kabel USB-C zapojte do síťového adaptéru USB (výstup: max. 5V / 2A, není součástí balení) a přístroje Menstrual Relax.
3. Síťový adaptér pak zapojte do vhodné zásuvky.
4. Případně můžete přístroj Menstrual Relax nabíjet také na počítači/notebooku. Propojte nabíjecí kabel USB-C s přístrojem Menstrual Relax a přípojkou USB na počítači/notebooku.
5. Během procesu nabíjení bliká LED kontrolka nabíjení zeleně. Jakmile je Menstrual Relax plně nabitý, svítí LED kontrolka nabíjení zeleně.

i Upozornění

Během nabíjení nelze přístroj Menstrual Relax používat.

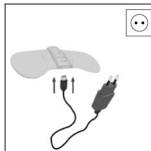


Umístění gelových polštářků

1. Opatrně odlepte jednu z ochranných fólií.
2. Gelový polštářek pečlivě umístěte na přístroj Menstrual Relax a opatrně sejměte druhou ochrannou fólii. Dbejte na to, aby okraj gelového polštářku nepřesahoval přes přístroj Menstrual Relax. Na každou elektrodu umístěte jeden gelový polštářek.

VAROVÁNÍ

Opatrně a pomalu stáhněte ochrannou fólii. Ujistěte se, že samolepicí gelové polštářky nejsou poškozené, protože poškození nebo nerovnosti povrchu by mohly případně způsobit podráždění kůže.

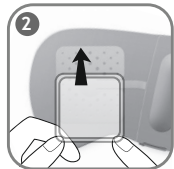








7. Použití

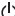
Zahájení stimulace

ⓘ Upozornění

Menstrual Relax je vybaven funkcí zahřívání s nárůstem tepla maximálně 43 °C a 15 stupni intenzity pro stimulaci TENS. Doporučujeme začínat s nižším stupněm intenzity, abyste si na přístroj postupně zvykli. Přístroj Menstrual Relax je vybaven funkcí automatického vypnutí. Vypne se automaticky po 20 minutách používání.

1. Přilepte Menstrual Relax na podbříšek.
2. Krátce stiskněte vypínač  a zapněte přístroj. LED kontrolka zahřívání bliká zeleně a přístroj Menstrual Relax začíná hřát. Pokud by LED kontrolka zahřívání začala červeně blikat, nabijte přístroj Menstrual Relax podle popisu v kapitole „Nabíjení baterie“.
3. Pro připojení elektrické nervové stimulace (TENS) stiskněte krátce vypínač . LED kontrolka TENS bliká. Pro spuštění stimulace stiskněte jednou tlačítko . Nyní je aktivována nejnižší intenzita.
4. Pokud chcete používat funkci TENS bez funkce zahřívání, znovu stiskněte vypínač . Nyní bliká jen LED kontrolka TENS a stimulaci můžete spustit stisknutím tlačítka .
5. Tlačítka  /  zvolte požadovaný stupeň intenzity.



6. Přístroj Menstrual Relax vypnete stisknutím vypínače  na 3 sekundy. LED kontrolky zahřívání a TENS zhasnou.
7. Po aplikaci opatrně sejměte přístroj Menstrual Relax z podbřišku. Gelové polštářky opět opatrně zakryjte ochrannou fólií.

Pokyny k používání


- Před sejmutím přístroj Menstrual Relax vypněte.
- Mezi jednotlivými aplikacemi si udělejte přestávku minimálně 30 minut.
- Přístroj Menstrual Relax používejte jen tak často, jak vám to bude příjemné. Jakmile se již nebude cítit při používání přístroje Menstrual Relax příjemně, přerušte aplikaci.
- Přístroj Menstrual Relax obsahuje funkci Body Loose, která detekuje kontakt přístroje s tělem. Při nedostatečném kontaktu s tělem přístroj pípne a vypne se. Pokud je přístroj umístěn na těle, a přesto pípne, očistěte gelové polštářky a zkuste přístroj znovu spustit. Jestliže přístroj stále pípá, vyměňte gelové polštářky.
- Jestliže již gelové polštářky nepřiléhají dobře ke kůži, ihned je vyměňte. Přístroj Menstrual Relax použijte teprve po výměně gelových polštářků. Jinak by nerovnoměrná přilnavost gelových polštářků mohla způsobit poranění pokožky.
- Jestliže pocítujete nepříjemné proudové rázy, vypněte přístroj Menstrual Relax a očistěte gelové polštářky.
- Pokud zjistíte, že po používání přístroje Menstrual Relax při menstruaci silněji krvácíte, přestaňte přístroj používat.

Programy

Cyklus	1	2	3
Šířka impulzů	100 μ s	250 μ s	75 μ s
Frekvence impulzů	100 Hz	8 Hz	85 Hz
Trvání cyklu	120 s	120 s	160 s


Frekvence impulzů

Frekvence udává počet jednotlivých impulzů za sekundu, uvádí se v Hz (Hertz). Lze ji získat výpočtem převrácené hodnoty periody impulzů.

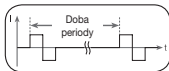

Šířka impulzu

Udává délku jednotlivého impulzu v mikrosekundách. Šířka impulzu mimo jiné určuje hloubku proniknutí proudu, obecně tak platí: větší svalová hmota vyžaduje větší šířku impulzu.

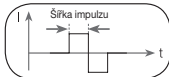

8. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ

- Po použití přístroj očistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem.

- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, když bude zcela suchý.
- Pro zajištění dlouhodobé přilnavosti čistěte lepicí elektrody opatrně navlhčenou utěrkou nepouš-
tější vlákna.
- K čištění nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

9. Příslušenství a náhradní díly


Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Příslušenství a náhradní díly jsou navíc dostupné v běžném obchodě.

Název	Číslo položky nebo objednáací číslo
1 x sada samolepicích gelových polštářků	648.49

10. Co dělat v případě problémů?

Problém	Možná příčina	Odstranění
Přístroj se po stisknutí vypínače nezapne.	Baterie je pravděpodobně vybitá.	Nabijte plně baterii. Pokud se přístroj nadále nezapíná, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nedrží na těle.	Gelové polštářky by mohly být znečistěné nebo opotřebované. Případně není ošetřované místo dostatečně čisté.	Očistěte lepkavý povrch gelových polštářků navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna. Pokud nebudou gelové polštářky ani pak pevně držet, musíte je vyměnit.
		Před každým použitím očistěte pokožku a před ošetřením nepoužívejte žádné tělové balzámy ani ošetřující oleje. Oholení místa aplikace může zvýšit přilnavost gelových polštářků.
Nepocítujete žádnou stimulaci.	Gelové polštářky by mohly být znečistěné nebo opotřebované. Možná je nutné nabít baterii.	Zajistěte, aby gelové polštářky byly pevně umístěny v místě aplikace.
		Baterie je téměř vybitá. Plně ji nabijte.

Problém	Možná příčina	Odstranění
Vnímáte nepříjemný pocit na gelových polštářcích.	Gelové polštářky jsou opotřebované. Mohou způsobit podráždění pokožky, protože již nelze zaručit rovnoměrný celoplošný rozvod proudu.	Vyměňte gelovou vrstvu.
Pokožka v oblasti ošetření je zarudlá.	Rychle odeznívající zarudnutí pokožky pod gelovými polštářky není nebezpečné a lze ho vysvětlit lokálně vyvolaným silnějším prokrvením vlivem TENS a zahřívání.	Okamžitě přerušete stimulaci a vyčkejte, dokud se pokožka nevrátí do běžného stavu. Pokud podráždění pokožky přetrvává nebo dochází ke svědění či zánětu, konzultujte další použití přístroje se svým lékařem. Příčinu je možno příp. hledat v alergii na lepidlo na povrch elektrody.
Pokožka pod zahříváním plochou je červená.	Zarudnutí pod zahříváním plochou přístroje Menstrual Relax lze vysvětlit silným prokrvením zahřáté tkáně.	Stav pokožky by se měl po určité době použití přístroje opět normalizovat. Pokud zarudnutí kůže přetrvává nebo případně dochází ke svědění či zánětu, konzultujte další použití přístroje s funkcí zahřívání se svým lékařem.

Problém	Možná příčina	Odstranění
Přístroj Menstrual Relax se velmi zahřívá.		Stiskněte vypínač  , vypněte funkci zahřívání a používejte jen funkci TENS.

11. Likvidace

Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat. Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtuť.

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



12. Technické údaje

Model	EM 50 Menstrual Relax
Typ	FT-610
Tvar výstupní křivky	bifázické obdélníkové impulzy
Trvání impulzu	75–250 μ s
Frekvence impulzů	8–100 Hz
Výstupní napětí	Max. 80 Vpp (na 1 000 Ω)
Stupně zahřívání	1 (až 43 °C)
Výstupní proud	Max. 80 mApp (na 1 000 Ω)
Napájení	lithium-polymerová baterie, 320 mAh
Délka stimulace	20 minut, přístroj se pak automaticky vypne
Intenzita	nastavitelná od 0 do 15
Provozní podmínky	5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) při relativní vlhkosti vzduchu 15–90 %

Skladovací podmínky	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) při relativní vlhkosti vzduchu 0–90 %
Rozměry	cca 95 x 193 x 15 mm
Hmotnost	47 g

Technické změny vyhrazeny.

Sériové číslo se nachází na přístroji.

Tento přístroj odpovídá evropským normám EN60601-1 a EN60601-1-2 (shoda s EN 55011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) a podléhá speciálním bezpečnostním opatřením z hlediska elektromagnetické kompatibility. Nezapomeňte, že přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít na tento přístroj vliv. Přesnější údaje si můžete vyžádat na uvedené adrese zákaznického servisu nebo přečíst na konci návodu k použití. Přístroj odpovídá požadavkům evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC, zákonu o zdravotnických prostředcích.

Pro tento přístroj není nutná žádná funkční zkouška a poučení podle § 5 německé vyhlášky pro provozovatele zdravotnických prostředků (MPBetreibV).

Rovněž není nutné provádět bezpečnostní kontroly podle § 6 vyhlášky pro provozovatele zdravotnických prostředků.

13. Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě



VAROVÁNÍ

- Příklad je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Příklad lze při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení nebo může dojít k výpadku displeje/příkladu.
- Nepoužívejte příklad v bezprostřední blízkosti jiných příkladů nebo s příklady naskládanými na sobě, neboť by mohlo dojít k chybnému způsobu provozu. Pokud by však bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento příklad i ostatní příklady sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto příkladu, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost příkladu a způsobit chybný způsob provozu.
- Radiofrekvenční příklady (včetně periférií jako anténních kabelů nebo externích antén) používejte minimálně ve vzdálenosti 30cm od všech součástí tohoto příkladu, včetně všech kabelů dodávaných společně s příkladem. Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu příkladu.
- Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu příkladu.

14. Záruka a servis

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.

Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 5 let od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.

Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz příložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit

- kopii faktury / doklad o nákupu
- originální výrobek

společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na

- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);
- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



**Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uscho-
vajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným
používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.**

Oboznámenie sa

Vážená zákazníčka,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

Čo je EM 50 Menstrual Relax?

Krčcovité bolesti v podbruší alebo silné menštruačné bolesti sa vyskytujú u mnohých žien pred a počas menštruácie. Okrem toho trpí veľa žien na ochorenia, ako endometrióza, ktoré zapríčiňujú bolesti v podbruší. Bolesti sú často také silné, že ženy túžia po okamžitom zmiernení bolesti. Inovatívny Menstrual Relax je samodržiaci TENS-prístroj s funkciou tepla na zmiernenie bolesti pri menštruačných ťažkostiach a bolestiach na základe endometriózy. Vďaka použitej technológii TENS je možné pomocou Menstrual Relax cielene pôsobiť proti bolesti. Menstrual Relax disponuje celkovo 15 stupňami intenzity. Na ešte príjemnejšie zmiernenie ťažkostí ponúka navyše možnosť pripojenia blahodarného tepla. Menstrual Relax pozostávajúci zo silikónovej gumy v zdravotníckej kvalite je extrémne tenký a flexibilný a perfektne sa prispôsobí ošetrovanej časti tela. Technologicky vyspelý spínací obvod zabezpečuje energeticky nenáročné ošetrovanie v trvaní 20 minút (na jedno nabitie akumulátora až 6 ošetrení). Menstrual Relax je bezpečná a jednoduchá metóda liečby bolesti, ktorá ponúka používateľke celkom nové skúsenosti v liečbe bolestí podbrušia.

Čo je TENS a čo dokáže?

Pod pojmom TENS, transkutánnou elektrickou neurostimuláciou, sa rozumie elektrická stimulácia nervov pôsobiaca cez pokožku. TENS je klinicky overená, účinná, nemedikamentózna metóda schválená na liečbu bolestí s konkrétnymi príčinami, ktorá pri správnom použití nemá vedľajšie účinky a ktorá umožňuje jednoduchú samoliečbu. Zmiernenie, resp. potlačenie bolesti sa okrem iného dosahuje potlačením vedenia bolesti nervovými vláknami a nárastom vylučovania telu vlastných endorfínov, ktoré svojím účinkom na centrálny nervový systém znižujú pocit bolesti. Táto metóda je vedecky podložená a schválená lekármi.

Každé ochorenie, v prípade ktorého by bola aplikácia TENS zmysluplná, je potrebné konzultovať s ošetroujúcim lekárom. Tento vám tiež poskytne pokyny k samoliečbe s TENS. TENS je klinicky testovaná a schválená na použitie pri menštruačných ťažkostiach a na zmiernenie bolesti pri endometrióze. Prístroje TENS fungujú na princípe dodávania elektrického prúdu cez pokožku. Gélové podložky pritom slúžia ako prenosové médium, ktoré podlieha prirodzenému opotrebovaniu. Ak už nie je možný dostatočný kontakt prostredníctvom gélových podložiek alebo ak Menstrual Relax neprilieha k pokožke celou plochou, potom sa musí vymeniť. V opačnom prípade môže lokálne zvýšená hustota prúdu spôsobiť podráždenie pokožky.

1. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 x Menstrual Relax








2 x samodržiace gélové podložky






1 x USB kábel


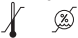


1 x tento návod na obsluhu

2. Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

 	<p>Likvidácia v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p>
	<p>VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie Vášho zdravia</p>
	<p>POZOR Prístroj môže dodávať efektívne výstupné hodnoty nad 10 mA pri spriemerovaní 5-sekundového intervalu.</p>
	<p>Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie</p>
	<p>Výrobca</p>
	<p>Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve</p>

	<p>Aplikačná časť typ BF</p>
	<p>Nepoužívajte pri implantovaných elektrických prístrojoch (napr. kardiostimulátory)</p>
	<p>Nepoužívajte v blízkosti srdca</p>
	<p>Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.</p>
<p>IP 22</p>	<p>Prístroj je chránený pred vniknutím cudzích predmetov $\geq 12,5$ mm a proti šikmo kvapkajúcej vode</p>
	<p>Dátum trvanlivosti</p>

	<p>Prečítajte si návod na použitie</p>
<p>Storage</p> 	<p>Prípustná skladovacia teplota a vlhkosť vzduchu</p>
<p>Operating</p> 	<p>Prípustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu</p>
	<p>Obal ekologicky zlikvidujte</p>

3. Účel použitia

Menstrual Relax používajte výlučne:

- Na ľuďoch.
- Na vlastné použitie.
- Na účel, pre ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné.

- Na vonkajšie použitie.
- Na domáce a súkromné použitie.
- S dodaným a objednatelným originálnym príslušenstvom, pretože v opačnom prípade zaniká nárok na záruku. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA


Použitie prístroja nenahrádza konzultáciu s lekárom a liečbu. V prípade akejkoľvek bolesti alebo ochorenia sa preto vždy najskôr poraďte so svojim lekárom!

Aby sa predišlo poškodeniu zdravia, Menstrual Relax nepoužívajte v nasledovných prípadoch:

- Pri implantovaných elektrických prístrojoch (napr. kardiostimulátory).
- Pri kovových implantátoch.
- U používateľov inzulínovej pumpy.
- Pri vysokej horúčke (napr. $> 39^{\circ}\text{C}$).
- Pri známych alebo akútnych poruchách srdcového rytmu a iných poruchách tvorby a vedenia vzruchov na srdci.
- Pri záchvatových ochoreniach (napr. epilepsia).
- V tehotenstve.
- V prípade rakovinových ochorení.
- Po operáciách, pri ktorých môžu zosilnené svalové kontrakcie narušiť proces hojenia.



- V blízkosti srdca. Stimulačné elektródy sa nesmú používať na žiadnej oblasti predného hrudného koša (ohraničeného rebrami a hrudnou kosťou) a predovšetkým sa nesmú používať na veľkých prsných svaloch. V takom prípade sa môže zvýšiť riziko komorovej fibrilácie srdca a môže dôjsť k jeho zástave.
- Na kostenej časti lebky, v oblasti úst, hltana alebo hrtana.
- V oblasti krku/krčnej tepny.
- V oblasti pohlavných orgánov.
- Na pokožke s akútnym alebo chronickým ochorením (poškodenie alebo zápal), (napr. pri bolestivých alebo bezbolestných zápaloch, sčervenaniach, vyrážkach (napr. alergie), popáleninách, narazeníach, opuchoch a otvorených alebo hojajúcich sa ranách a pooperačných jazvách, ktoré sú súčasťou procesu hojenia).
- V priestoroch s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni, alebo pri kúpaní alebo sprchovaní.
- Po konzumácii alkoholu.
- Pri súčasnom pripojení na vysokofrekvenčné chirurgické zariadenie.
- Pri akútnych alebo chronických ochoreniach žalúdočno-črevného traktu.

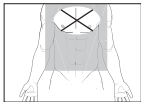

VÝSTRAHA

Pred použitím prístroja sa poradte s ošetrojúcim lekárom pri:

- Akútnych ochoreniach, predovšetkým pri podozrení na vysoký krvný tlak alebo dokázanom vysokom krvnom tlaku, pri poruchách zrážanlivosti krvi, náchylnosti na tromboembolické ochorenia a pri zhubných nádoroch.

- Všetkých kožných ochoreniach alebo otvorených ranách.
- Neobjasnených chronických bolestivých stavoch, nezávisle od časti tela.
- Diabetes.
- Všetkých poruchách citlivosti so znížením vnímaním bolesti (napr. poruchy metabolizmu).
- Inej, súčasne vykonávanej medicínskej liečbe.
- Problémoch vyskytujúcich sa pri stimulačnej liečbe.
- Pretrvávajúcich podráždeniach kože z dôvodu dlhodobej stimulácie na rovnakom mieste.



VÝSTRAHA

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli prípadným nebezpečenstvám.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak by prístroj nefungoval správne alebo by spôsobil nevolnosť alebo bolesti, okamžite prerušte jeho používanie.
- Menstrual Relax pred pripnutím, resp. odobratím vypnite.
- V žiadnom prípade Menstrual Relax neupravujte (napr. orezaním). To má za následok väčšiu hustotu prúdu, ktorá môže byť nebezpečná.
- V prvých minútach použitia sedte alebo ležte, aby ste v prípade zriedkavého výskytu vagálnej reakcie (pocit slabosti) neboli vystavený zbytočnému nebezpečenstvu poranenia. V prípade výskytu pocitu slabosti prístroj okamžite vypnite a vyložte si nohy (na cca 5 – 10 min).

- Menstrual Relax nepoužívajte v spánku, pri vedení motorového vozidla alebo súčasnej obsluhu strojov.
- Menstrual Relax nepoužívajte pri činnostiach, pri ktorých môžu byť nebezpečné nepredvídané reakcie (napr. zosilnené svalové kontrakcie napriek nízkej intenzite).
- Nepoužívajte tento prístroj súčasne s inými prístrojmi, ktoré do vášho tela vysielajú elektrické impulzy.
- Skutočná teplota Menstrual Relax sa môže meniť podľa stavu pokožky, veku, bolestivého miesta atď.
- Ak by ste teplo pociťovali ako príliš horúce, ihneď zastavte ošetrovanie. V TENS ošetrovaní môžete pokračovať bez funkcie tepla.
- Po jedle počkajte aspoň hodinu, kým začnete s aplikáciou Menstrual Relax.
- Menstrual Relax nepoužívajte na vlhkej pokožke, pretože tým sa obmedzí priľnavosť gélových podložiek.
- Dbajte na to, aby počas stimulácie nemohlo dôjsť ku kontaktu kovových predmetov, ako sú pracky opaskov alebo náhrdelníky, s elektródami. Ak sa na mieste aplikácie nachádza šperk alebo piercing (napr. piercing pupka), musí sa pred použitím prístroja odstrániť, pretože v opačnom prípade hrozia bodové popáleniny.
- Predbežné ošetrovanie pokožky zmastňujúcimi krémami alebo masťami sa neodporúča.
- Na pripevnenie Menstrual Relax na kožu nepoužívajte žiadne lepiace pásky, bandáže alebo iné pomôcky, okrem gélových podložiek, ktorý sú na to určené. V opačnom prípade by mohla nerovnomerná priľnavosť gélových podložiek spôsobiť poranenie kože.

VÝSTRAHA


Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi


- Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti môžu akumulátory prehltnúť a zadusiť sa nimi. Z toho dôvodu skladujte akumulátory mimo dosahu malých detí!
- Keď akumulátor vytekol, natiahnite si pred uchopením prístroja ochranné rukavice.
- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedrvtvte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor (pozri kapitolu 6).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora ho úplne nabite aspoň každých 6 mesiacov.

POZOR

- Chráňte prístroj pred silnejšími nárazmi.
- Prístroj nepoužívajte, ak nesie známky poškodenia alebo ak nefunguje správne. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou. Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Tento prístroj nepoužívajte na iných vyhrievacích telesách, ohrievacích prvkoch, ako sú sušičky alebo rúry ani v ich blízkosti a nepoužívajte ho v blízkosti (~1 m) krátkovlnných a mikrovlnných zariadení (napr. mobilné telefóny), pretože tieto môžu spôsobiť nepríjemné nárasty prúdu.
- Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho a v prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Okamžite vypnite prístroj, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy.
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj otvoriť a/alebo opraviť svojpomocne.
- Realizáciu opravy prenechajte zákazníckemu servisu alebo autorizovanému predajcovi. Pri nedodržaní zaniká záruka.

5. Popis prístroja

1. Zvýšenie intenzity
2. LED indikátor tepla / nabitia akumulátora
3. TENS LED
4. Tlačidlo ZAP/VYP 
5. Zníženie intenzity
6. Tepelná plocha
7. Pravá elektróda
8. USB prípojka
9. Ľavá elektróda

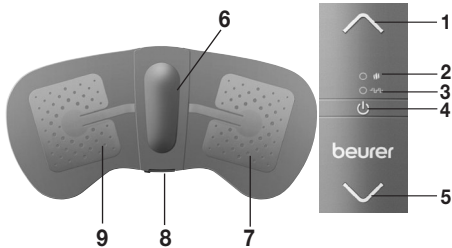

6. Uvedenie do prevádzky

Nabitie akumulátora


i Upozornenie

Pred prvým uvedením Menstrual Relax do prevádzky ho musíte najskôr aspoň 2 hodiny nabíjať. Postupujte nasledovne:

1. Na Menstrual Relax otvorte kryt prípojky USB-C.
2. Spojte dodaný nabíjací kábel USB-C s USB sieťovým adaptérom (output: max. 5 V/2 A, nie je súčasťou balenia) a Menstrual Relax.
3. Následne zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
4. Alternatívne môžete Menstrual Relax nabíť aj pomocou svojho počítača/laptopu. Nato spojte USB nabíjací kábel s Menstrual Relax a prípojkou USB svojho počítača/laptopu.
5. Počas nabíjania bliká LED indikátor nabitia akumulátora nazeleno. Keď je Menstrual Relax úplne nabitý, svieti LED indikátor nabitia akumulátora trvalo nazeleno.

i Upozornenie

Menstrual Relax sa počas nabíjania nedá používať.

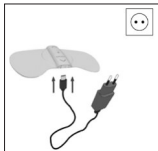


Umiestnenie gélových podložiek

1. Opatrne odstráňte jeden z ochranných filmov.
2. Gélovú podložku starostlivo umiestnite na Menstrual Relax a opatrne stiahnite zvyšný ochranný film. Dbajte na to, aby okraj gélovej podložky nepresahoval cez okraj Menstrual Relax. Na každú elektródu dajte jednu gélovú podložku.

VÝSTRAHA

Ochranný film stiahnite opatrne a pomaly. Uistite sa, či nie sú samodržiacie gélové podložky poškodené, pretože poškodenie alebo nerovnosti na filme by mohli prípadne spôsobiť podráždenie pokožky.

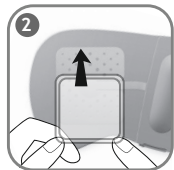








7. Použitie


Začiatok používania

ⓘ Upozornenie

Menstrual Relax disponuje jedným tepelným stupňom s vyvíjaním tepla do maximálne 43 °C a 15 stupňami intenzity pre aplikáciu TENS. Zo začiatku odporúčame začať s nízkym stupňom intenzity, aby ste si pomaly zvykli na prístroj. Menstrual Relax má automatické vypnutie. Automaticky sa vypne po 20 minútach používania.

1. Nalepte si Menstrual Relax na podbrušie.
2. Na zapnutie podložky podržte krátko stlačené tlačidlo ZAP/VYP . LED tepla bliká nazeleno a Menstrual Relax sa začne zohrievať. Ak by LED tepla blikala načerveno, nabite Menstrual Relax, ako je popísané v kapitole „Nabitie akumulátora“.
3. Na zapnutie elektrickej nervovej stimulácie (TENS) krátko stlačte tlačidlo ZAP/VYP . TENS LED bliká. Na spustenie stimulácie stlačte raz tlačidlo . Teraz je aktivovaná najnižšia intenzita.
4. Ak chcete funkciu TENS používať bez funkcie tepla, znovu stlačte tlačidlo ZAP/VYP . Teraz bliká len TENS LED a môžete spustiť stimuláciu stlačením tlačidla .
5. Vyberte si pomocou tlačidiel  /  požadovaný stupeň intenzity.



6. Na vypnutie Menstrual Relax podržte tlačidlo ZAP/VYP  stlačené 3 sekundy. LED tepla a TENS LED zhasnú.
7. Po použití si Menstrual Relax opatrne stiahnite z podbrušia. Na ochranu gélových podložiek na ne znovu naneste ochranné filmy.

Upozornenia týkajúce sa používania


- Menstrual Relax pred odobratím vypnite.
- Medzi aplikáciami si urobte prestávku v trvaní aspoň 30 minút.
- Menstrual Relax používajte len tak často, ako vám je príjemné. Keď už funkcie Menstrual Relax nepocítujete ako príjemné, prerušte aplikáciu.
- Menstrual Relax disponuje funkciou body loose, ktorá deteguje, či má prístroj kontakt s telom. V prípade nedostatočného kontaktu s telom prístroj pípa a potom sa sám vypne. Ak je prístroj umiestnený na tele a predsa pípa, vyčistite gélové podložky a skúste prístroj znovu spustiť. V prípade pokračovania neustáleho pípania vymeňte gélové podložky.
- Keď sa začne znižovať príľnavosť gélových podložiek, bezodkladne ich vymeňte. Menstrual Relax sa smie opäť používať až po výmene gélových podložiek. V opačnom prípade by mohla nerovnomerná príľnavosť gélových podložiek spôsobiť poranenie kože.
- Ak pocítujete nepríjemné nárusty prúdu, vypnite Menstrual Relax a mierne ho posuňte.
- Ak zistíte, že po použití Menstrual Relax máte výrazne silnejšie menštruačné krvácanie, prístroj nepoužívajte.

Programy

Cyklus	1	2	3
Šírka impulzu	100 μs	250 μs	75 μs
Frekvencia impulzov	100 Hz	8 Hz	85 Hz
Trvanie cyklu	120 s	120 s	160 s


Frekvencia impulzov

Frekvencia udáva počet jednotlivých impulzov za sekundu a ich počet sa uvádza v Hz (Hertz). Je možné ju zistiť tak, že sa vypočíta vratná hodnota doby periódy.

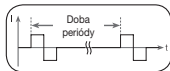

Šírka impulzu

Udáva trvanie jedného impulzu v mikrosekundách. Šírka impulzu okrem iného určuje hĺbku, do ktorej prúd prenikne, pričom vo všeobecnosti platí: Väčšia svalová hmota si vyžaduje väčšiu šírku impulzu.

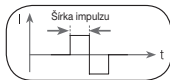

8. Čistenie a starostlivosť



VÝSTRAHA

- Po každom použití vyčistite prístroj mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete handričku navlhčiť jemným mydlovým roztokom.
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. V prípade, že sa tak stalo, nepoužívajte ho, kým kompletne nevyschne.
- Na zaistenie čo najdlhšej príľnavosti lepiacich elektród by opatrne ich čistite vlhkou, nechľpatou handrou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

9. Príslušenstvo a náhradné diely


Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo na príslušnej adrese servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Príslušenstvo a náhradné diely navyše dostanete v obchode.

Označenie	Výrobné alebo objednávacie číslo
1 x súprava samodržiacich gélových podložiek	648.49

10. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Prístroj sa po stlačení tlačidla ZAP/VYP nezapne.	Akumulátor je pravdepodobne vybitý.	Úplne nabite akumulátor. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis.
Prístroj nedrží na tele.	Gélové podložky sú pravdepodobne znečistené alebo opotrebované. Alebo nie je ošetrované miesto na pokožke dostatočne čisté.	Lepiacu plochu gélových podložiek vyčistite vlhkou, nechľpatou handrou. Ak aj po vyčistení gélové podložky nedržia na tele, musia sa vymeniť.
		Pred každým použitím si vyčistite pokožku a pred liečbou nepoužívajte telové krémy a ošetrojúce oleje. Životnosť gélových podložiek môže predĺžiť oholenie.
Nedochádza ku citelnej stimulácii.	Gélové podložky sú pravdepodobne znečistené alebo opotrebované. Prípadne sa musí nabiť akumulátor.	Uistite sa, že gélové podložky majú pevný kontakt s ošetrovanou oblasťou.
		Akumulátor je takmer vybitý. Úplne ho nabite.

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Pocítujete nepríjemný pocit na gélových podložkách.	Gélové podložky sú opotrebované. Toto môže mať z dôvodu nerovnomerného rozdelenia prúdu po celej ploche za následok podráždenie pokožky.	Vymeňte gélové podložky.
Pokožka na ošetrovanej oblasti sčervenala.	Rýchlo odoznievajúce sčervenanie pod gélovými podložkami nie je nebezpečné a je možné ho vysvetliť lokálne stimulovaným silnejším prerušením spôsobeným TENS a teplom.	Okamžite prerušte ošetrovanie a počkajte, kým sa stav pokožky nevráti do normálu. Ak však podráždenie pokožky pretrváva a dôjde prípadnému k svrbeniu alebo zápalu, musíte sa pred ďalším použitím poradiť so svojim lekárom. Prípadnou príčinou môže byť alergia na lepiacu plochu.
Pokožka pod tepelnou plochou sčervenie.	Sčervenanie pod tepelnou plochou Menstrual Relax sa dá vysvetliť silnejším prerušením zahriateho tkaniva.	Stav pokožky by sa mal nejaký čas po ošetrovaní zase normalizovať. Ak však sčervenanie pretrváva a dôjde prípadnému k svrbeniu alebo zápalom, musíte sa pred ďalším použitím poradiť so svojim lekárom.

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Menstrual Relax je príliš horúci.		Stlačte tlačidlo ZAP/VYP  , aby ste vypli funkciu tepla a používajte len funkciu TENS.

11. Likvidácia

Spotrebované, úplne vybité batérie musíte likvidovať vložением do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný zlikvidovať nabíjateľné

batérie. Na nabíjateľných batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,

Cd = batéria obsahuje kadmium,

Hg = batéria obsahuje ortuť.

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



12. Technické údaje

Model	EM 50 Menstrual Relax
Typ	FT-610
Tvar výstupnej krivky	Dvojfázové obdĺžnikové impulzy
Trvanie impulzov	75 – 250 μ s
Frekvencia impulzov	8-100 Hz
Výstupné napätie	Max. 80 Vpp (pri 1000 Ω)
Tepelné stupne	1 (do 43 °C)
Výstupný prúd	Max. 80 mApp (pri 1000 Ω)
Zdroj napätia	Lítiový polymérový akumulátor 320 mAh
Doba aplikácie	20 minút, prístroj sa následne automaticky vypne
Intenzita	nastaviteľná od 0 do 15
prevádzkové podmienky	5°C – 40°C (41°F – 104°F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu 15–90 %

Skladovacie podmienky	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu 0 – 90 %
Rozmery	cca 95 × 193 × 15 mm
Hmotnosť	47 g

Technické zmeny vyhradené.

Sériové číslo sa nachádza na prístroji.

Tento prístroj zodpovedá európskej norme EN60601-1 a EN60601-1-2 (zhoda s EN 55011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) a podlieha mimoriadnym bezpečnostným opatreniam s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu. Myslite pritom na to, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu vplývať na tento prístroj. Presnejšie informácie si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu alebo ich nájdete na konci návodu na obsluhu. Tento prístroj je v súlade so smernicou EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC a zákonom o zdravotníckych výrobkoch.

Pre tento prístroj nie je potrebná kontrola funkčnosti ani poučenie podľa § 5 nemeckého nariadenia o prevádzkovaní medicínskych produktov (MPBetreibV).

Taktiež nie je potrebné vykonať bezpečnostno-technické kontroly podľa § 6 nemeckého nariadenia o prevádzkovaní medicínskych produktov.

13. Informácie o elektromagnetickej kompatibilite



VÝSTRAHA

- Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých prostrediach uvedených v tomto návode na obsluhu, vrátane domáceho prostredia.
- V prítomnosti elektromagnetického rušenia môže byť prístroj za určitých okolností používaný iba v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť napr. chybové hlásenia alebo porucha displeja/prístroja.
- Treba sa vyhnúť tomu, aby sa tento prístroj používal bezprostredne vedľa iných prístrojov alebo s ďalšími prístrojmi na sebe, pretože to môže mať za následok chybný spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné používať ho popísaným spôsobom, tento prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa presvedčili, že fungujú správne.
- Použitím iného príslušenstva ako toho, ktoré stanovil alebo zabezpečil výrobca tohto prístroja, môže mať za následok zvýšené rušivé elektromagnetické vyžarovanie alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť zariadenia a môže viesť k chybnému spôsobu prevádzky.
- Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne káble alebo externé antény) musia byť vzdialené aspoň 30 cm od všetkých častí prístroja, vrátane káblov, ktoré sú súčasťou balenia. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prístroja.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prístroja.

14. Záruka/servis

Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté.

Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 5 rokov od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia.

Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné.

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť

- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
- originálny výrobok

spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené

- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebojú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);
- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;
- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.

Chyby a zmeny vyhradené



HIVOX BIOTEK INK.

5F., No. 12, Xingde Rd., Sanchong Dist., New Taipei City, Taiwan R.O.C.



Hivox Biotek B.V.

De Run 4428, 5503 LR, Veldhoven, Netherlands

Distributed by Beurer GmbH



Dovozce a distributor

BORGY CZ, a.s.

Trojanova 2022/12

120 00 Praha 2 Nové Město

IČ: 28959442

DiČ: CZ28959442

Tel.: +420 326 316 904

E-mail: info@borgy.cz

www.borgy.cz

Datum poslední revize návodu k použití: 06.04. 2020.