

SENCOR®

SBS 8002BK



FITNES OSOBNÁ VÁHA
Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SBS 8002BK



A

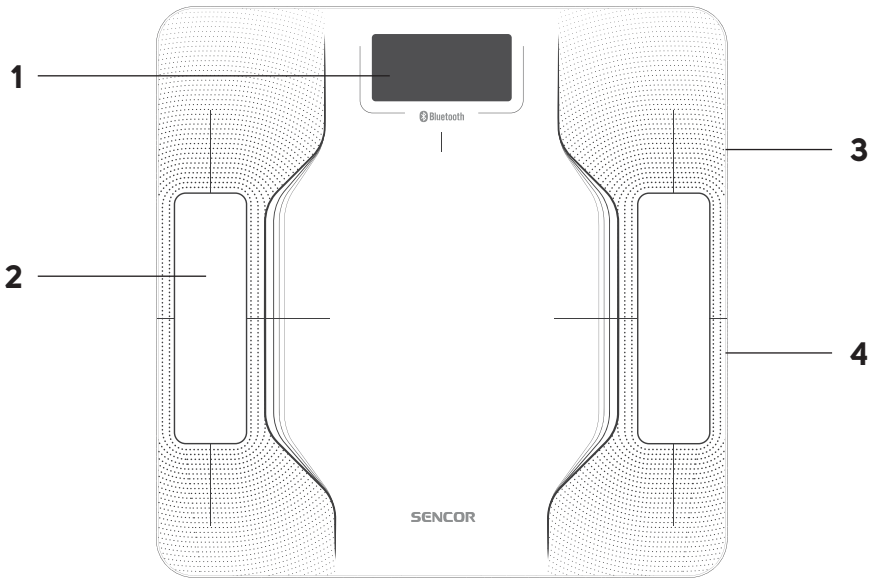

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné, lekárske alebo iné účely.
- Tento spotrebič smú používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, na elektrický alebo plynový varič, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerne prašnom prostredí.
- Dbajte na to, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. To platí predovšetkým pri použití spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Spotrebič nepoužívajte v dosahu silného elektromagnetického poľa.
- Než vstúpite na vážiacu plochu, uistite sa, že jej povrch nie je vlhký a že nemáte mokré chodidlá. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Na spotrebič neskáče a neprekračujte jeho maximálnu nosnosť. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- V režime váženia hmotnosti s meraním a analýzou telesných parametrov treba stáť na vážiackej ploche čistými bosými chodidlami, pričom obidve chodidlá musia byť umiestnené na elektródach.
- Nameraný percentuálny podiel kostného, tukového a svalového tkaniva a vody v tele je len orientačný. Nevývodzujte, prosím, z výsledkov meraní lekárske závery. Ak sa podiel tukového tkaniva a úroveň hydratácie výrazne líšia od normálu, odporúčame tento stav konzultovať s lekárom alebo výživovým poradcom. O odporúčaní vhodných opatrení na dosiahnutie optimálnej telesnej hmotnosti požiadajte tiež svojho lekára alebo výživového poradcu.
- Odchýlky merania percentuálneho podielu kostného, tukového a svalového tkaniva a vody v tele môžu byť vyššie u osôb starších ako 70 rokov a profesionálnych športovcov.
- Výsledky merania môžu byť skreslené po intenzívnom cvičení, pri extrémnej dehydratácii organizmu, alebo ak držíte drasticky redukčnú diétu.
- Použitie funkcie merania podielu kostného, tukového a svalového tkaniva a vody v tele sa neodporúča:
 - Osobám s implantovaným kardiostimulátorom alebo iným lekáskym implantátom;
 - Tehotným ženám;
 - Osobám so symptómami edému (opuchu) alebo osobám podstupujúcim liečbu dialýzou.
- Deti mladšie ako 10 rokov a osoby staršie ako 100 rokov môžu tento spotrebič používať len v režime váženia hmotnosti.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Skladujte ho vo vodorovnej polohe a dbajte na to, aby na ňom neboli umiestnené žiadne predmety.
- Ak sa rozhodnete, že spotrebič nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ak by batéria vytekla do vnútorného priestoru spotrebiča, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Vždy používajte nové batérie rovnakého typu. Nikdy nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu. Batérie nikdy nevkładajte do ohňa, neskratujte ani nijako nepoškozujte. Po skončení ich životnosti ich ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobijacie batérie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa batériu zhltno, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržiavajte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravňový kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- | | |
|--|---|
| A1 Displej | A4 Tlačidlo UNIT na nastavenie jednotky hmotnosti (umiestnené v spodnej časti váhy) |
| A2 Náštipné plochy s elektródami | |
| A3 Priestor na vloženie batérií (umiestnený v spodnej časti váhy) | |

ÚČEL POUŽITIA

- Táto fitness osobná váha s vysoko presným tenzometrickým senzorom vám pomôže ukladať a sledovať vašu hmotnosť a namerané údaje v aplikácii vo vašom inteligentnom telefóne. Váha prenáša namerané údaje do aplikácie inteligentného telefónu prostredníctvom Bluetooth technológie. Tu je možné sledovať históriu meraní hmotnosti, vytvárať grafy výsledkov, stanoviť si cieľovú hmotnosť a sledovať vývoj vašej hmotnosti v čase.

ZDROJ NAPÁJANIA

- Súčasťou balenia tejto váhy sú 2 ks 1,5-V batérie typu AAA. Odstráňte kryt priestoru na batérie a vložte dve nové batérie rovnakého typu. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne priestoru na batérie, a nasadte kryt.
- Hneď, ako sa na displeji zobrazí „Lo“, treba obidve batérie vymeniť za nové. Postupujte rovnakým spôsobom. Najskôr vyjmite vybité batérie.
- Ak nebudete váhu dlhší čas používať, vyberte z nej, prosím, obidve batérie.



Poznámka:

Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nekombinujte staré a nové batérie. Batérie neskratujte ani nepoškodzujte.

POUŽITIE VÁHY

1. Váhu umiestnite na rovný, hladký, tvrdý a stabilný povrch. Neumiestňujte ju na koberec alebo iný mäkký povrch, inak môže byť výsledok merania skreslený.
2. Otvorte aplikáciu vo svojom inteligentnom telefóne.
3. Postavte sa bosými nohami na náštipné plochy s elektródami. Váha sa automaticky zapne.
4. Počkajte, až sa hodnota na displeji ustálí, a potom dôjde k prenosu dát do aplikácie vášho inteligentného telefónu. Dáta v aplikácii sa automaticky priradia k správnej osobe a uložia do pamäte telefónu.
5. Váha sa automaticky vypne. Opatrne zostúpte z váhy.

Pri vážení stojte pokojne a nenakláňajte sa. Aby ste zaistili porovnateľné výsledky, je dôležité, aby ste sa vážili v rovnaký denný čas, najlepšie ráno. Výsledky váženia môžu ovplyvniť rôzne faktory, napr. oblečenie, ktoré máte na sebe, jedlo a pitie, ktoré skonzumujete pred váženíom.



Poznámka:

Váhu je možné používať bez nainštalovanej aplikácie. Na displeji sa zobrazí aktuálna hmotnosť, ale nedôjde k prenosu dát.

Voľba jednotiek hmotnosti

V spodnej časti váhy sa nachádza tlačidlo **UNIT**. Jeho opakovaným stlačením zvolíte požadovanú jednotku hmotnosti medzi: kg – lb – st. Jednotky hmotnosti je možné zmeniť aj priamo v aplikácii.

Automatické vypnutie

Ak váha zostane niekoľko minút v nečinnosti, automaticky sa vypne.

STIAHNUTIE A POUŽITIE APLIKÁCIE SENCOR HOME

- Túto váhu je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME.
- Stiahnite si aplikáciu do svojho inteligentného mobilného telefónu, zaregistrujte sa a spravujte namerané hodnoty priamo v aplikácii. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, pridajte si váhu do svojich zariadení.



Pridanie váhy do zoznamu zariadení prostredníctvom Bluetooth

Váhu si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME spárovaním cez Bluetooth.

1. Vo vašom mobilnom telefóne zapnite funkciu Bluetooth.
2. Otvorte aplikáciu a na domovskej stránke aplikácie kliknite na ikonu „+“ a potom kliknite na „Pridať zariadenie“.
3. Zo zoznamu kategórií zvolte „Cvičenie a zdravie“ a tam „Osobná fitness váha (Bluetooth)“.
4. Budete vyzvaní na reset zariadenia. Stačte a dlho podržte tlačidlo **UNIT**, kým sa na displeji nezobrazí „CLR“. Potom v aplikácii kliknite na „Ďalšie“.
5. Potvrďte, že váha je pripravená na pripojenie, a kliknite na „Ďalšie“.
6. Dôjde k automatickému spárovaniu váhy s mobilným telefónom a pridanú váhu do zoznamu zariadení.



Poznámka:

Ak pripojenie cez Bluetooth zlyhá alebo nie je možné, uistite sa, že medzi vašim telefónom a váhou nie sú žiadne pevné prekážky a obe zariadenia sú blízko seba.

Pridanie pomocou QR kódu

Vášu váhu SBS 8002BK môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu.

1. Na domovskej stránke aplikácie kliknite na ikonu „+“.
2. Na obrazovke pridanie zariadenia kliknite na symbol „[-]“ v pravom hornom rohu.
3. Naskenujte nasledujúci QR kód:



Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na pridanie zariadenia.

Možné problémy a ich riešenie

Nie je možné zobraziť namerané dáta v telefóne:

- Skontrolujte, či svieti ikona Bluetooth.

- Skontrolujte, či ste zapli funkciu Bluetooth vo vašom telefóne.
- Skontrolujte, že ste v dosahu Bluetooth signálu.
- Znovu otvorte aplikáciu.
- Vypnite a znovu zapnite funkciu Bluetooth a obnovte spojenie s váhu.

Spojnie zlyhalo.

- Uistite sa, že k váhe je pripojený len jedno Bluetooth zariadenie.
 - Skontrolujte, že verzia Bluetooth vo vašom zariadení je 4.0 a novšia.
- Displej váhy je zhasnutý.
- Skontrolujte, či batérie nie sú vybité, a prípadne ich vymeňte za nové.
 - Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Chybové hlásenia

Chybové hlásenie	Význam	Riešenie
0000	Prebieha meranie.	Prebieha meranie telesnej hmotnosti a hodnôt. Nezostupujte z váhy a uistite sa, že stojíte bosými nohami na elektródach.
Err	Preťaženie	Prekročili ste maximálnu nosnosť váhy. Opätne z váhy zostúpte.
Lo	Nízky stav batérií	Vymeňte batérie za nové.
[-]	Kalibrácia	Počas merania došlo k chybe. Zostúpte z váhy a opakujte meranie.
[CLr]	Resetovanie Bluetooth	Ak nie je možné váhu spárovať s telefónom, stlačte a dlho podržte tlačidlo UNIT na spodnej strane váhy, kým sa na displeji nezobrazí „CLr“. Tým dôjde k resetu Bluetooth modulu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy používajte mäkkú hubku mierne navlhčenú v teplej vode. Utrite dosucha čistou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Váhu neponárajte do vody ani inej tekutiny ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie..... 2x 1,5-V batéria typu AAA
 Nosnosť..... 180 kg / 400 lb / 28 st
 Presnosť váženia..... 100 g / 0,2 lb
 Voľba jednotiek..... kg / lb / st

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

Týmto SENCOR vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SBS 8002BK je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese www.sencor.eu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.