



CS Masážní přístroj EMS na nohy Vital Legs

Návod k použití 2

SK EMS masážny prístroj na nohy Vital Legs

Návod na obsluhu 18

Obsah

1. K seznámení.....	4	6. Použití.....	11
2. Použití v souladu s určením	4	7. Čištění a uložení	14
3. Bezpečnostní pokyny.....	4	8. Co dělat v případě problémů?.....	15
4. Popis přístroje	9	9. Technické údaje.....	16
5. Uvedení do provozu	10	10. Záruka/servis.....	17



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu, péče o krásu i o dítě.

S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.



- 1x stimulátor prokrvení EMS
- 2x manžeta na bérce
- 1x síťový adaptér
- 2x připojovací kabel

- 1x dálkové ovládání
- tento návod k použití
- 2x baterie AAA pro dálkové ovládání
- 4x baterie AA pro stimulátor prokrvení EMS

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:



VAROVÁNÍ

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví



POZOR

Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.



Upozornění

Upozornění na důležité informace.



Používejte pouze v uzavřených prostorech.



Příložná část typu BF



0483

Značka CE potvrzuje shodu se základními požadavky směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.



Dodržujte návod k použití.



Sériové číslo

IP 21

Ochrana proti vniknutí cizích těles $\geq 12,5$ mm a proti svisle kapající vodě.

IP 22


Ochrana proti vniknutí cizích těles $\geq 12,5$ mm a proti kapající vodě ve sklonu 15°




Zelený bod: německý duální systém likvidace odpadu



Stimulátor prokrvení EMS nepoužívejte, pokud máte implantované elektrické přístroje (např. kardiostimulátory).

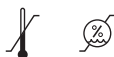

Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při skladování

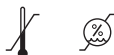

Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu



Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)



Přístroj může vysílat průměrné výstupní hodnoty 10 mA v intervalu po 5 sekundách.



Výrobce

1. K seznámení

Stimulátor prokrvení EMS Vital Legs beurer je elektrostimulační přístroj. Stimulátor prokrvení EMS zajišťuje elektrickou stimulaci svalové tkáně (EMS) chodidel a bérců.

Stimulátor prokrvení EMS byl vyvinut speciálně pro tyto účely:

- zmírnění otoků nohou a kotníků
- uvolnění při pocitu unavených a těžkých nohou
- zlepšení prokrvení

Jak funguje elektrostimulace?

Princip účinnosti elektrostimulačních přístrojů je založen na napodobování přirozených tělesných impulzů, které jsou pomocí elektrod přenášeny přes pokožku k nervovému, resp. svalovému vláknu. Elektrické impulzy jsou bezpečné a prakticky bezbolestné. Pociťujete pouze mírné mravenčení nebo vibrace. Elektrické impulzy vysílané do tkáně ovlivňují přenos vzruchu do nervových vláken a uzlin i do svalových skupin v oblasti aplikace.

Elektrická svalová stimulace (EMS) je rozšířenou a všeobecně uznávanou metodou a používá se již mnoho let ve sportovní a rehabilitační medicíně.

2. Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výlučně k elektrostimulaci chodidel a bérců lidí. Přístroj je určen pouze pro **vlastní potřebu**, ne pro lékařské nebo komerční účely. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Nepoužívejte přístroj, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře. Použijte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné! Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

3. Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody. Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a léčbu. Konzultujte vždy proto nejdříve každý druh bolesti nebo nemoci se svým lékařem!

VAROVÁNÍ

- Přístroj a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí uškrcení připojovacím kabelem a nebezpečí udušení následkem spolknutí malých dílů.
- Tento přístroj není určen k používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými (např. ztráta citlivosti) nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nepoužívejte přístroj, jestliže máte voperovaný kardiostimulátor nebo jiné implantáty, např. inzulinovou pumpu či jiné kovové implantáty.
- Nepoužívejte přístroj u osob s hlubokou žilní trombózou.
- Nepoužívejte přístroj u osob s arteriální či žilní trombózou nebo tromboflebitidou. Hrozí zbytkové riziko, že by při elektrické stimulaci cév mohlo dojít k vytvoření krevních sraženin a vzniku embólie. Proto přístroj nepoužívejte u osob s trombózou, i když k onemocnění došlo již před mnoha lety.
- Nepoužívejte přístroj u osob s kovovými implantáty.
- Nepoužívejte přístroj u osob s inzulinovou pumpou.
- Nepoužívejte přístroj při vysoké horečce (např. $> 39^{\circ}\text{C}$).
- Nepoužívejte přístroj v případech známých nebo akutních poruch srdečního rytmu a jiných poruch stimulace a oběhových poruch srdce.
- Nepoužívejte přístroj při záchvatových nemocích (např. epilepsie).
- Nepoužívejte přístroj v době těhotenství.
- Nepoužívejte přístroj při onemocnění rakovinou.
- Nepoužívejte přístroj na maligních ranách nebo kolem nich.
- Nepoužívejte přístroj na zlomených kostech, aby nedošlo k neúmyslnému posunu.
- Nepoužívejte přístroj po operacích, po nichž by zvýšené svalové kontrakce mohly narušit léčebný postup.
- Nepoužívejte přístroj na kůži s akutním nebo chronickým onemocněním, poraněním nebo zánětem (např. při bolestivých i nebolestivých zánětech a zarudnutí, vyrážce, zánětu žil, arteriální trombóze, žilní trombóze, tromboflebitidě, křečových žilách, alergiích, na popáleninách, pohmožděninách, otocích a otevřených nebo hojících se ranách nebo operačních jizvách). Používejte pouze na zdravé a čisté kůži.
- Nepoužívejte přístroj na tkáni se sklonem ke krvácení.
- Neumísťujte elektrody na oči nebo do tělních otvorů.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v koupelně nebo při koupání či sprchování.
- Nepoužívejte přístroj po konzumaci alkoholu.
- Nepoužívejte přístroj při současném připojení k vysokofrekvenčnímu chirurgickému přístroji.
- Nepoužívejte přístroj při akutních nebo chronických onemocněních žaludku a zažívacího traktu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti elektronických monitorovacích zařízení (např. srdečních monitorů nebo elektrokardiogramů)
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti přístrojů, které bez ochrany vysílají elektromagnetickou energii.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti srdce. Zde by použití mohlo zvýšit riziko fibrilace srdečních komor a vyvolat zástavu srdce.



Před použitím přístroje se poradte se svým lékařem v případě:

- akutních onemocnění, zejména při podezření nebo diagnóze vysokého krevního tlaku, při poruchách srážlivosti krve, sklonu k tromboembolickým onemocněním a rovněž v případě výskytu zhoubných novotvarů,
- všech kožních onemocněních,
- nevyjasněných chronických bolestí, nezávisle na části těla,
- diabetu,
- všech poruch senzibility se sníženým vnímáním bolesti (např. poruch látkové výměny),
- současně probíhajícího lékařského ošetření,
- výskytu potíží při stimulační léčbě,
- trvalého podráždění kůže z důvodu dlouhodobé stimulace elektrodou na stejném místě.



VAROVÁNÍ

- Nepřibližujte přístroj ke zdrojům tepla a nepoužívejte ho v blízkosti (~1 m) krátkovlnných nebo mikrovlnných zařízení (např. mobilů), neboť by mohly vzniknout nepříjemné proudové rázy.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Nikdy přístroj nevkládejte do vody nebo jiných kapalin.
- Přestane-li přístroj správně fungovat, dostaví-li se nevolnost nebo bolesti, okamžitě aplikaci přerušete.
- Přístroj je vhodný pro soukromé použití.
- Před sejmutím nebo přemístěním elektrod nejprve vypněte přístroj, resp. příslušný kanál, aby bylo zabráněno nechtěným impulzům.
- Přístroj nijak neupravujte.
- Elektrody nijak neupravujte (např. seříznutím). Mohla by se tím zvýšit proudová hustota, což by mohlo být nebezpečné (max. doporučená výstupní hodnota pro elektrody: 9 mA/cm², efektivní proudová hustota vyšší než 2 mA/cm² vyžaduje zvýšenou pozornost).
- Nepoužívejte přístroj během spánku, při řízení motorového vozidla nebo současně obsluhuje strojů.
- Na ovládání tlačítek nepoužívejte ostré předměty, např. špičku tužky nebo kuličkového pera.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných elektrických přístrojů nebo mezi nimi. Pokud tomu nelze zabránit, musíte před použitím zkontrolovat, zda přístroj v zamýšleném umístění řádně funguje.
- Tento přístroj podléhá speciálním bezpečnostním opatřením z hlediska elektromagnetické kompatibility a musí se instalovat a spouštět odpovídajícím způsobem.
- Přístroj byl důkladně testován a vyzkoušen, aby byl zaručen jeho řádný výkon a fungování.
- V blízkosti přístroje nepoužívejte žádná vysokofrekvenční komunikační zařízení nebo systémy RFID.
- Přístroj nepoužívejte při činnostech, při kterých by mohla nastat nepředvídaná a nebezpečná reakce (např. zvýšená svalová kontrakce navzdory nízké intenzitě).
- Dbejte na to, aby se během stimulace nedostaly žádné kovové předměty do kontaktu s elektrodami. Jestliže máte v oblasti aplikace nějaký šperk nebo piercing, musíte ho před použitím přístroje odstranit, jinak by mohlo dojít k bodovým popáleninám.
- Nenechávejte přístroj v dosahu dětí, abyste předešli případnému nebezpečí.
- Nezaměňujte připojovací kabely s elektrodami a kontakty se sluchátky nebo jinými přístroji a nepropojujte manžety s jinými přístroji.

- Nepoužívejte tento přístroj současně s jinými přístroji, které do těla vysílají elektrické impulzy.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů, kyslíku nebo oxidu dusnatého.
- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory, vždy použijte stejný typ baterií.
- Nepoužívejte žádné mastné krémy nebo masti na ošetření kůže před použitím přístroje. Mohlo by dojít k nepříjemným proudovým rázům. Pro lepší kontakt mezi nohou a elektrodou můžete použít vodu nebo vodivý gel na elektrody.

Bezpečnostní opatření

- Přístroj používejte pouze u člověka.
- Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné!
- Přístroj je určen jen k vnějšímu použití.
- Dlouhodobé účinky chronické elektrické stimulace nejsou známy.
- Elektrické stimulační přístroje nemají léčivý účinek.
- U citlivých osob se mohou elektrostimulace nebo elektrody vyvolat podráždění kůže.
- Používejte pouze manžety na bérce dodávané společně s přístrojem. Nepoužívejte přístroj s manžetami nebo elektrodami jiných výrobců.

Možné vedlejší účinky

- Možnými vedlejšími účinky jsou podráždění kůže, záněty a popáleniny pod elektrodami.

Úraz elektrickým proudem (při použití s adaptérem, bez baterií)



VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento stimulátor prokrvení EMS opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a pod napětím, které je uvedeno na adaptéru,
- nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady,
- nepoužívejte při bouřce.

Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout adaptér ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi napájecím kabelem a teplým povrchem přístroje. Napájecí kabel nikam neupínejte, nelámejte ho, ani ho nezamotávejte. Do přístroje nezapichujte žádné špendlíky nebo špičaté předměty.

Zajistěte, aby se přístroj, síťový adaptér a napájecí kabel nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami. Používejte přístroj proto jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ve vaně, sauně).

Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady. Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.

Poškození



POZOR

- Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Přístroj by neměl spadnout na zem nebo se rozebírat, aby bylo zajištěno jeho účinné fungování.
- Kontrolujte přístroj, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. V případě opotřebení, poškození nebo nesprávného používání přístroje je třeba jej před opětovným použitím nechat zkontrolovat u výrobce nebo prodejce.
- Okamžitě přístroj vypněte, pokud je poškozený nebo objeví-li se nějaká porucha.
- V žádném případě se nepokoušejte přístroj otevřít a/nebo opravit sami. Opravy nechte provádět pouze v zákaznickém servisu nebo u autorizovaného prodejce. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Nebezpečí požáru



VAROVÁNÍ

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

Přístroj proto

- nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem, ...
- nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.

Manipulace



POZOR

Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým čištěním.

Likvidace



POZOR

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci. Použité, zcela vybité baterie musíte likvidovat prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,


Hg = baterie obsahuje rtuť.




Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- ⚠ Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polaritu plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- ⚠ Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí nabíjet nebo zkratovat.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

4. Popis přístroje

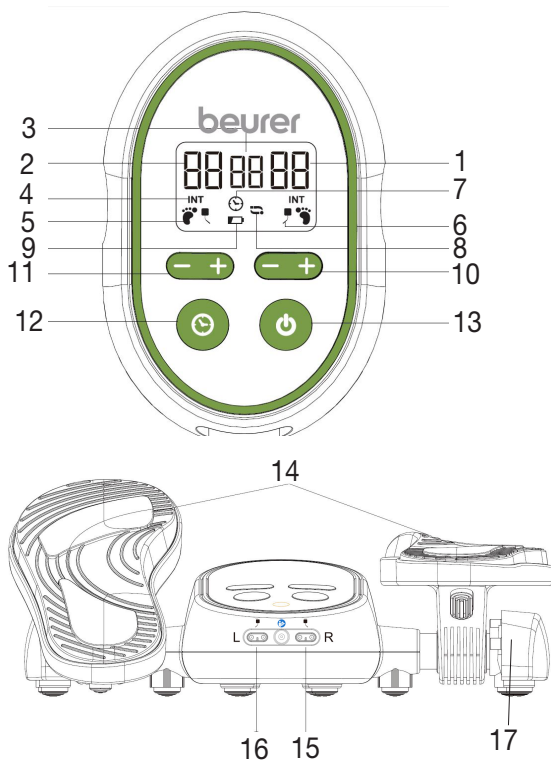

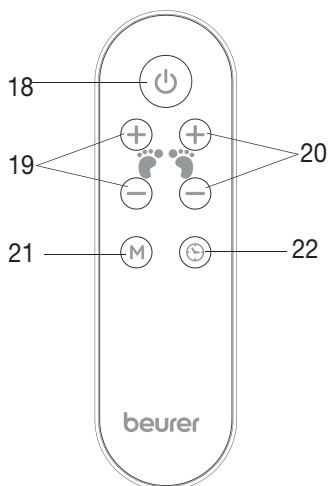

- 18. Vypínač ☰
- 19. Stupeň intenzity pro levou nohu
- 20. Stupeň intenzity pro pravou nohu
- 21. Tlačítko režimu (mode) pro výběr jedné z 15 variant impulzů
- 22. Tlačítko časovače

5. Uvedení do provozu


i Upozornění

Přístroj můžete používat s dodávaným síťovým adaptérem nebo s bateriemi. Doporučujeme používat síťový adaptér z důvodu zachování dlouhé životnosti přístroje.

Vložení baterií

Při používání přístroje s bateriemi musíte nejdříve do stimulatoru prokrvení EMS vložit baterie. Postupujte takto:


1. Otevřete kryt přihrádky na baterie na spodní straně stimulatoru prokrvení EMS.
2. Vložte čtyři baterie typu AA (1,5V) do přihrádky. Dbejte na to, aby byly baterie vloženy se správným pólováním (+/-) podle označení v přihrádce na baterie.
3. Poté přihrádku na baterie uzavřete tak, aby slyšitelně a viditelně zapadla do správné polohy.

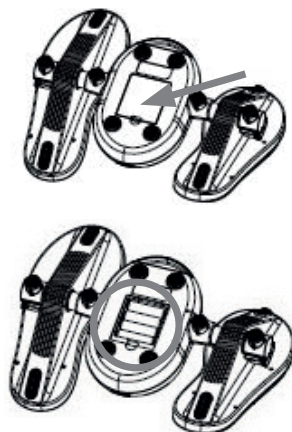

Vložení baterií do dálkového ovládání

Při používání dálkového ovládání musíte nejdříve do ovladače vložit baterie. Postupujte takto:

1. Otevřete kryt příhrádky na baterie na spodní straně dálkového ovládání tak, že pomocí ostrého předmětu zatlačíte uzávěr dozadu, aby se uvolnilo zajištění krytu.
2. Vložte dvě baterie typu AAA (1,5V) do příhrádky. Dbejte na to, aby byly baterie vloženy se správným pólováním (+/-) podle označení v příhrádce na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie dálkového ovládání tak, slyšitelně a viditelně zapadla do správné polohy.

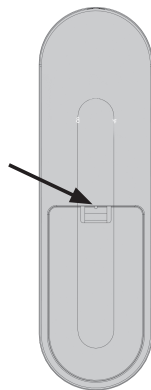

Připojení síťového adaptéru

Abyste mohli používat přístroj s dodávaným síťovým adaptérem, musíte nejdřív připojit síťový adaptér ke stimulátoru prokrvení EMS. Postupujte takto:


1. Připojte kabel síťového adaptéru k přípojce stimulátoru prokrvení EMS.
2. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
3. Do přístroje nevkládejte žádné baterie, pokud ho chcete používat jen se síťovým adaptérem.

 **VAROVÁNÍ** Nebezpečí zakopnutí! Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

6. Použití

Upozornění

- Se stimulátorem prokrvení EMS můžete stimulovat nejen chodidla, ale i bérce.
- Stimulátor prokrvení EMS používejte max. 90 minut denně. Při delším používání může nadměrná stimulace svalů vést k jejich napětí místo k uvolnění.
- Stimulátor prokrvení EMS se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.

 **VAROVÁNÍ**


- Používejte stimulátor prokrvení EMS pouze vsedě. Nikdy nepoužívejte stimulátor prokrvení EMS vestoje!

6.1 Stimulace nohou

Při spuštění stimulace nohou postupujte takto:

Krok 1: Umístění přístroje na zem

- Postavte stimulátor prokrvení EMS na rovný a pevný podklad. Židli postavte tak daleko od stimulátoru prokrvení EMS, abyste na něj vsedě pohodlně dosáhli nohama.

 **VAROVÁNÍ** Nebezpečí zakopnutí! Nikdy nepoužívejte stimulátor prokrvení EMS vestoje..



Krok 2: Položení obou nohou na přístroj

- Položte nohy (bosé) na plochy pro chodidla stimulatoru prokrvení EMS. Dbejte na to, aby klenba nohy doléhala k vyvýšené ploše. Nezáleží přitom na tom, jestli máte větší nebo menší nohy, než je plocha pro chodidla stimulatoru prokrvení EMS.




POZOR Dbejte na to, aby nohy v kolenou svíraly přibližně úhel 90 stupňů.



Funkce kroků


Stimulátor prokrvení EMS má doplňkovou funkci kroků. S funkcí kroků můžete během elektrostimulace pohybovat chodidly dopředu a dozadu. Pohyby hlezenního kloubu podporují prokrvení a mohou přispět ke zmenšení otoků. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme při elektrostimulaci využívat i funkci kroků.

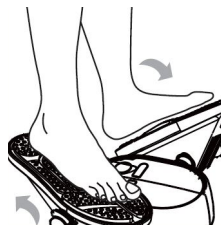- Při používání funkce kroků vytáhněte boční podpěry na přístroji. Plochy pro chodidla se nyní mohou naklápět dopředu a dozadu.
- Pokud je vám funkce kroků nepříjemná nebo ji chcete ukončit, zatlačte boční podpěry do přístroje tak, aby slyšitelně zapadly do správné polohy. Plochy pro chodidla můžete zajistit v horizontální poloze nebo naklonené směrem dopředu.




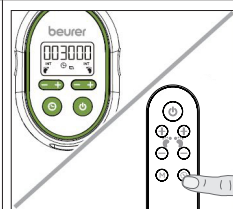
Krok 3: Zapnutí přístroje

- Stimulátor prokrvení EMS zapněte stisknutím vypínače  na přístroji nebo na dálkovém ovládní. Na začátku je na pravé i levé straně nastaven stupeň intenzity .

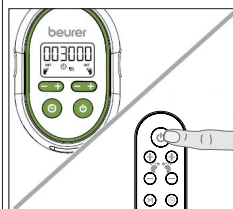

Krok 4: Nastavení délky stimulace

- Tlačítkem  na přístroji nebo na dálkovém ovládní nastavte požadovanou délku stimulace. Můžete nastavit délku stimulace od 5 do 90 minut (v krocích po 5 minutách).



Krok 5: Zahájení stimulace / nastavení stupně intenzity

- Zvolte tlačítka +/- na přístroji nebo na dálkovém ovládacím požadovaný stupeň intenzity vždy pro levou a pravou nohu. Můžete nastavit stupeň intenzity od 1 do 99. Pokud krátce stisknete tlačítko +/-, můžete postupně zvyšovat intenzitu. Podržte tlačítko +/- stisknuté, abyste rychleji nastavili požadovaný stupeň intenzity.

⚠ POZOR Začněte nejdříve s nižším stupněm intenzity, abyste si na přístroj postupně zvykli.



- Pokud elektrostimulaci téměř necítíte, můžete lehce navlhčit chodidla vodou. Zlepší se tím vodivost elektrického proudu. Nepoužívejte pleťové krémy ani mléka, ale jen vodu nebo gel na elektrody na vodní bázi.

i Upozornění

- Během stimulace se ve smyčce střídá 15 různých variant impulzů vždy po dobu jedné minuty. Pokud chcete trvale nastavit některou z variant impulzů, stiskněte tlačítko **M** na dálkovém ovládacím. Pokud chcete opět spustit různé varianty impulzů, znovu stiskněte tlačítko **M**.


Detekce odlehčení

- Pokud sejmete nohy na méně než 5 sekund z ploch pro chodidla stimulatoru prokrvení EMS, zazní na přístroji tři krátká pípnutí. Jakmile položíte nohy opět na plochy pro chodidla, opět se nastaví dříve nastavený stupeň intenzity.
- Pokud sejmete nohy na více než 5 sekund z ploch pro chodidla stimulatoru prokrvení EMS, nastaví se stupeň intenzity na 0. Pokud bude chtít pokračovat se stimulací, zvýšte opět stupeň intenzity na stimulatoru prokrvení EMS nebo na dálkovém ovládacím.

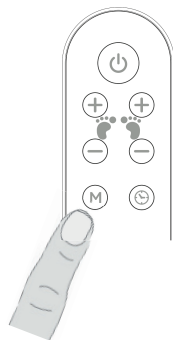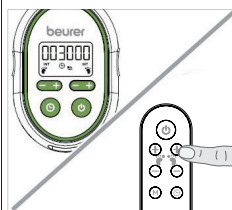




Krok 6: Vypnutí přístroje

- Stimulátor prokrvení EMS vypněte stisknutím vypínače \odot na přístroji nebo na dálkovém ovládacím.

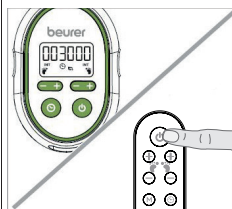

6.2 Stimulace bérců

Pokud chcete kromě chodidel stimulovat současně také bérce, postupujte takto:
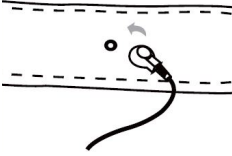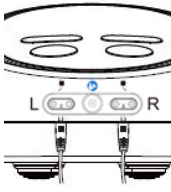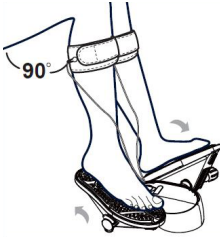
<p>Krok 1: Navlhčení manžet</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyjměte obě manžety z obalu. Navlhčete obě manžety vodou nebo gelem na elektrody na vodní bázi. Zlepší se tím vodivost elektrického proudu. Nepoužívejte pleťové krémy ani mléka, ale jen vodu nebo gel na elektrody na vodní bázi.	
<p>Krok 2: Propojení připojovacího kabelu a manžety</p> <ul style="list-style-type: none">• Podle obrázku připojte připojovací kabel k patentnímu knoflíku na manžetě. Ujistěte se, že je připojovací kabel správně propojený s manžetou.	
<p>Krok 3: Propojení připojovacího kabelu a přístroje</p> <p>⚠ VAROVÁNÍ</p> <p>Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zapojte připojovací kabely do připojovacích zdířek L a R na přední straně přístroje.	
<p>Krok 4: Nasazení manžet na bérce</p> <ul style="list-style-type: none">• Podle obrázku nasadte manžety na bérce. Elektroda by měla přiléhat k lýtku a může být podle obvodu nohy až na holeni.• Dbejte na to, aby manžety přiléhaly těsně, ovšem musíte se vždy cítit příjemně. Položte připojovací kabely tak, abyste mohli pohybovat nohama na plochách pro chodidla nahoru a dolů.	
<p>Krok 5: Spuštění stimulace bérců</p> <ul style="list-style-type: none">• Při spuštění stimulace bérců dodržujte kroky 1 až 6 podle kapitoly „6.1 Stimulace nohou“.	

7. Čištění a uložení

Čištění

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním vždy odpojte adaptér od sítě i od přístroje.
- Před každým čištěním vyjměte baterie ze stimulatoru prokrvení EMS.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
- Očistěte plochy s elektrodami stimulatoru prokrvení EMS a manžety po každém použití utěrkou nebo vlhkou houbičkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.


- Nechejte stimulátor prokrvení EMS uschnout při pokojové teplotě a chraňte ho před horkem a slunečním zářením.
- Stimulátor prokrvení EMS znovu použijte, až když bude úplně suchý.

Uložení

Pokud stimulátor prokrvení EMS nebudete delší dobu používat, doporučujeme ho uložit v originálním obalu v suchém prostředí, ničím ho nezatěžujte. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí, domácích zvířat a škůdců. Na stimulátor prokrvení EMS nestavte žádné předměty. Vyjměte baterie ze stimulátoru prokrvení EMS a dálkového ovládání. Dbejte na to, aby v místě uložení byly dodrženy podmínky skladování.

8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
Stimulátor prokrvení EMS nelze zapnout.	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie ve stimulátoru prokrvení EMS.
	Baterie nejsou správně vloženy.	Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. Dbejte na označení polaritý plus (+) a minus (-).
	Stimulátor prokrvení EMS není správně zapojen.	Propojte síťový adaptér se stimulátorem prokrvení EMS a vhodnou zásuvkou.
Dálkové ovládání nereaguje.	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
	Baterie nejsou správně vloženy.	Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. Dbejte na označení polaritý plus (+) a minus (-).
Stimulátor prokrvení EMS je zapnutý, ale není cítit žádná elektrostimulace.	Máte příliš suché nohy.	Navlhčete spodní stranu nohou. Případně zvyšte stupeň intenzity.
Elektrostimulace je příliš slabá.	Nastavený stupeň intenzity je příliš nízký.	Zvyšte stupeň intenzity.
Elektrostimulace je nepříjemná.	Nastavený stupeň intenzity je příliš vysoký.	Snižte stupeň intenzity.
	Stimulátor prokrvení EMS se nepoužívá podle pokynů v tomto návodu na použití.	Před použitím přístroje si přečtěte návod na použití.
Po skončení stimulace bolí lýtka a chodidla.	Nastavený stupeň intenzity je příliš vysoký. Svaly jsou přetížené.	Snižte stupeň intenzity. Před jednotlivými stimulacemi si udělejte dostatečnou přestávku, aby se svaly mohly zregenerovat.

Stimulace byla přerušena.	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie ve stimulatoru prokrvení EMS.
	Stimulátor prokrvení EMS se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.	Stimulátor prokrvení EMS se opět zapíná stisknutím vypínače  .

9. Technické údaje

Typ	FM 250
Tvar výstupní křivky	bifázické obdélníkové impulzy
Frekvence impulzů	10 Hz~ 36 Hz
Trvání impulzu	250 μ s
Výstupní napětí	0~ 80 Vpp (na 500 Ω)
Napájení stimulatoru prokrvení EMS	vstup síťového adaptéru: 100–240 V~; 50/60 Hz 0,2 A; výstup: DC 6,0 V; 300 mA; nebo DC 6,0 V; 4x baterie AA
Napájení dálkového ovládání	DC 3,0 V; 2x baterie AAA
Životnost baterií	1 týden (při každodenní stimulaci po 30 minutách)
Kanály	2 kanály
Programy	1 program s 15 různými opakujícími se variantami impulzních vln
Délka stimulace	5–90 minut (v krocích po 5 minutách)
Stupně intenzity	1–99
Provozní podmínky	5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) při relativní vlhkosti vzduchu 30–75 %; 700 hPa–1 060 hPa
Podmínky pro uložení a přepravu	–10 °C – 55 °C (14 °F – 131 °F) při relativní vlhkosti vzduchu 10–90 %; 700 hPa–1 060 hPa
Rozměry	Stimulátor prokrvení EMS: cca 283,3 x 372,2 x 111,4 mm
Hmotnost	1 500 g (pouze stimulator prokrvení EMS, bez baterií)

Sériové číslo se nachází na přístroji nebo v přihrádce na baterie.

Životnost baterií: Dodávané baterie vydrží při 500 Ω asi na 8 stimulací po 30 minutách.

Upozornění: Při použití přístroje mimo specifikaci není zaručeno jeho správné fungování!

Technické změny v rámci zlepšování a dalšího vývoje výrobku jsou vyhrazeny.

Tento přístroj odpovídá evropským normám EN60601-1 a EN60601-1-2 (shoda s CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) a podléhá speciálním bezpečnostním opatřením z hlediska elektromagnetické kompatibility. Nezapomeňte prosím, že přenosná a mobilní

vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít vliv na tento přístroj. Přesnější údaje si můžete vyžádat na uvedené adrese zákaznického servisu.

Přístroj odpovídá požadavkům evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS, zákona o zdravotnických prostředcích. Pro tento přístroj není nutná žádná funkční zkouška ani poučení podle § 10 vyhlášky pro provozovatele zdravotnických prostředků (MPBetreibV).

Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě



VAROVÁNÍ

- Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Přístroj lze při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení nebo může dojít k výpadku displeje/přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů nebo s přístroji naskládanými na sobě, neboť by mohlo dojít k chybnému způsobu provozu. Pokud by však bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento přístroj i ostatní přístroje sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost přístroje a způsobit chybný způsob provozu.
- Radiofrekvenční přístroje (včetně periférií jako anténních kabelů nebo externích antén) používejte minimálně ve vzdálenosti 30 cm od všech součástí tohoto přístroje, včetně všech kabelů dodávaných společně s přístrojem. Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.
- Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.

10. Záruka/servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.
2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 - d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.

Obsah

1. Oboznámenie sa	20	6. Použitie	28
2. Použitie podľa určenia	20	7. Čistenie a uskladnenie	31
3. Bezpečnostné upozornenia	20	8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	31
4. Popis prístroja	26	9. Technické údaje	32
5. Uvedenie do prevádzky	27	10. Záruka/servis	34



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskôršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.



- 1x EMS stimulátor prekrvenia
- 2x manžety pre predkolenie
- 1x sieťový adaptér
- 2x pripájací kábel

- 1x diaľkové ovládanie
- tento návod na obsluhu
- 2x AAA batérie pre diaľkové ovládanie
- 4x AA batéria pre EMS stimulátor prekrvenia

Vysvetlenie symbolov

V návode na obsluhu a na typovom štítku sú použité tieto symboly



VÝSTRAHA

Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.



POZOR

Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.



Upozornenie

Upozornenie na dôležité informácie.



Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.



Aplikačná časť typ BF



0483

Symbol CE potvrdzuje súlad so základnými požiadavkami smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.



Dodržujte návod na obsluhu



Sériové číslo

IP 21

Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov $\geq 12,5$ mm a proti zvisle kvapkajúcej vode

IP 22


Chránený proti cudzím telesám $\geq 12,5$ mm a chránený proti kvapkajúcej vode padajúcej diagonálne až do 15 stupňov




Zelený bod: nemecký duálny systém likvidácie odpadov



EMS stimulátor prekrvenia nepoužívajte pri implantovaných elektrických prístrojoch (ako napr. kardiostimulátory).

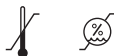

Prípustná skladovacia teplota a vlhkosť vzduchu

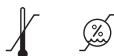

Prípustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu



Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Prístroj môže dodávať efektívne výstupné hodnoty nad 10 mA pri spriemerovaní 5sekundového intervalu.



Výrobca

1. Oboznámenie sa

EMS stimulátor prekrvenia Vital Legs od firmy beurer je elektrostimulačný prístroj. EMS stimulátor prekrvenia generuje elektrickú stimuláciu svalového tkaniva (EMS) v oblasti chodidla a predkolenia.

EMS stimulátor prekrvenia bol špeciálne vyvinutý na nasledujúce účely:

- Zmiernenie opuchu na chodidlách a členkoch
- Úľava od pocitu unavených a ťažkých nôh
- Zlepšenie prekrvenia

Ako funguje elektrostimulácia?

Princíp fungovania elektrostimulačných prístrojov je založený na imitácii telu vlastných impulzov, ktoré sa prostredníctvom elektród vedú cez kožu k nervom, resp. svalovým vláknam. Elektrické stimuly sú neškodné a prakticky bezbolestné. Môžete pri nich pociťovať nanajvýš jemné mravenčenie alebo vibrácie. Elektrické impulzy odosielané do tkaniva ovplyvňujú prenos vzruchov v nervových vláknach, ako aj nervové uzliny a svalové skupiny v oblasti použitia.

Elektrická svalová stimulácia (EMS) je veľmi rozšírená a všeobecne uznávaná metóda, ktorá sa už dlhé roky používa v športovej a rehabilitačnej medicíne.

2. Použitie podľa určenia

Tento prístroj je určený výlučne na elektrostimuláciu chodidiel a predkolení u ľudí. Prístroj je určený len **na osobné použitie**, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Prístroj nemôže nahradiť liečbu lekárom. Prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení. Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so svojim lekárom. Prístroj používajte výlučne na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné! Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.

3. Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si tento návod na obsluhu pozorne! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Použitie prístroja nenahrádza konzultáciu s lekárom a liečbu. V prípade akejkoľvek bolesti alebo ochorenia sa preto vždy najskôr poraďte so svojim lekárom!



VÝSTRAHA

- Obal a prístroj uchovávajúte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo uškrtenia káblom sieťového adaptéra a nebezpečenstvo zadusenia malým časťami, ktoré môže dieťa prehltnúť.
- Používanie tohto prístroja nie je určené pre osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými (napr. vnímanie bolesti) alebo duševnými schopnosťami alebo pre osoby, ktoré kvôli nedostatku skúseností a/alebo vedomostí nevedia, ako používať prístroj, pokiaľ neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť alebo nedostali pokyny, ako majú prístroj používať.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Aby sa predišlo škodám na zdraví, použitie prístroja sa dôrazne neodporúča v nasledovných prípadoch:



- Aby sa predišlo škodám na zdraví, použitie prístroja sa dôrazne neodporúča v nasledovných prípadoch:
- Nepoužívajte prístroj u ľudí s hlbokou venóznou trombózou.
- Nepoužívajte prístroj u ľudí s arteriálnou alebo venóznou trombózou alebo tromboflebitídou. Existuje zvyškové riziko, že elektrická stimulácia krvných ciev na alebo v blízkosti krvných zrazenín môže viesť k embolizácii. Z tohto dôvodu nepoužívajte prístroj u ľudí s trombózou, dokonca ani vtedy, ak mali túto chorobu pred niekoľkými rokmi.
- Nepoužívajte prístroj u osôb s kovovými implantátmi.
- Nepoužívajte prístroj u nositeľov inzulínovej pumpy.
- Nepoužívajte prístroj pri vysokej horúčke (napr. $> 39\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Nepoužívajte prístroj pri známej alebo akútnej srdcovej arytmií a iných poruchách tvorby impulzov a vedenia srdca.
- Nepoužívajte prístroj, ak trpíte záchvatmi (napríklad epilepsia).
- Nepoužívajte prístroj počas tehotenstva.
- Nepoužívajte prístroj v prípade existujúceho rakovinového ochorenia.
- Nepoužívajte prístroj na rany rakovinového typu.
- Nepoužívajte prístroj na zlomené kosti, aby ste predišli nežiaducemu pohybu.
- Nepoužívajte prístroj po operáciách, pri ktorých môžu zosilnené svalové kontrakcie narušiť proces hojenia.
- Nepoužívajte prístroj na nohy na pokožke s akútnym alebo chronickým ochorením (poškodenie alebo zápal), (napr. pri bolestivých alebo bezbolestných zápaloch, sčervenaniach, vyrážkach (napr. alergie), popáleninách, narazeníach, opuchoch, ranách a pooperačných jazvách, ktoré sú súčasťou procesu hojenia). Používajte len na zdravú a očistenú pokožku.
- Prístroj nepoužívajte na tkanivách, ktoré majú tendenciu krváčať.
- Elektrody neumiestňujte na oči ani do telesných otvorov.
- Nepoužívajte prístroj, ak sa nachádzate v priestoroch s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni alebo pri kúpaní alebo sprchovaní.
- Nepoužívajte prístroj po konzumácii alkoholu.
- Nepoužívajte prístroj, ak je súčasne pripojený k vysokofrekvenčnému chirurgickému zariadeniu.
- Nepoužívajte zariadenie pri akútnych alebo chronických ochoreniach tráviaceho traktu.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti elektronických monitorovacích zariadení (ako sú monitory srdca alebo elektrokardiogramy).
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti zariadení, ktoré nevyžarujú elektromagnetickú energiu.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti srdca. V takom prípade sa môže zvýšiť riziko komorovej fibrilácie srdca a môže dôjsť k jeho zástave.

Pred použitím prístroja sa poradte s ošetrojúcim lekárom pri:

- akútnych ochoreniach, predovšetkým pri podozrení na vysoký krvný tlak alebo dokázanom vysokom krvnom tlaku, pri poruchách zrážanlivosti krvi, náchylnosti na tromboembolické ochorenia a pri zhubných nádoroch;
- všetkých kožných ochoreniach;
- neobjasnených chronických bolestivých stavoch nezávisle od časti tela;
- diabetes;
- všetkých poruchách citlivosti so znížením vnímaním bolesti (napr. poruchy metabolizmu);
- inej, súčasne vykonávanej medicínskej liečbe;
- problémoch vyskytujúcich sa pri stimulačnej liečbe;
- pretrvávajúcích podráždeniach kože z dôvodu dlhodobej stimulácie na rovnakom mieste.



VÝSTRAHA

- Prístroj uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a nepoužívajte ho v blízkosti (~1 m) krátkovlnných a mikrovlnných zariadení (napr. mobilné telefóny), pretože tieto môžu spôsobiť nepríjemné nárasty prúdu.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Ak by prístroj nefungoval správne alebo by spôsobil nevoľnosť alebo bolesti, okamžite prerušte jeho používanie.
- Prístroj je určený na vlastné použitie.
- Pred odstraňovaním alebo premiestňovaním elektród najskôr prístroj, príp. príslušný kanál vypnite, aby ste predišli nechceným podráždeniam.
- Prístroj neupravujte.
- Elektródy neupravujte (napr. zastrihnutím). Ich úprava má za následok väčšiu hustotu prúdu, ktorá môže byť nebezpečná (max. odporúčaná výstupná hodnota pre elektródy je 9 mA/cm², efektívna hustota prúdu presahujúca 2 mA/cm² si vyžaduje zvýšenú pozornosť).
- Nepoužívajte prístroj v spánku, pri vedení motorového vozidla alebo súčasnej obsluhu strojov.
- Na stláčanie tlačidiel nepoužívajte ostré predmety, ako napr. ceruzky alebo pero.
- Nepoužívajte prístroj bezprostredne vedľa alebo medzi inými elektrickými spotrebičmi. Ak je to nevyhnutné, pred použitím zariadenia musíte overiť, či v zamýšľanej konfigurácii nastavenia funguje správne.
- Tento prístroj podlieha osobitným bezpečnostným opatreniam týkajúcim sa EMC a musí byť správne nainštalovaný a uvedený do prevádzky.
- Prístroj bol dôkladne otestovaný a odskúšaný, aby sa zabezpečil správny výkon a funkčnosť.
- V blízkosti zariadenia nepoužívajte iné RF komunikačné zariadenia ani systémy RFID.
- Prístroj nepoužívajte pri činnostiach, pri ktorých môžu byť nebezpečné nepredvídané reakcie (napr. zosilnené svalové kontrakcie napriek nízkej intenzite).
- Dbajte na to, aby počas stimulácie nemohlo dôjsť ku kontaktu kovových predmetov s elektródami. Ak sa na mieste aplikácie nachádza šperk, musí sa pred použitím prístroja odstrániť, pretože v opačnom prípade hrozia bodové popáleniny.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli prípadným nebezpečenstvám.
- Pripájací kábel s kontaktmi nenahrádzajte slúchadlami alebo inými prístrojmi a elektródy nezapájajte do iných prístrojov.

- Nepoužívajte tento prístroj súčasne s inými prístrojmi, ktoré do vášho tela vysielajú elektrické impulzy.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti ľahko zápalných látok, plynov alebo výbušnín.
- Nepoužívajte akumulátory a používajte iba batérie rovnakého typu.
- Nepoužívajte masťné krémy na predošetrenie pokožky. Mohlo by to mať za následok ťažkú ujmu na zdraví. Na zlepšenie kontaktu medzi chodidlom a elektródou môžete použiť vodu alebo gél pre elektródy.

Bezpečnostné opatrenia

- Prístroj používajte len na ľudoch.
- Prístroj používajte výlučne na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné!
- Prístroj je určený iba na externé použitie.
- Dlhodobé účinky chronickej elektrickej stimulácie nie sú známe.
- Elektrické prístroje na stimuláciu svalov nemajú žiadny liečebný účinok.
- U citlivých osôb môže dôjsť k podráždeniu kože elektrostimuláciou alebo elektródami.
- Prístroj používajte len s manžetami na predkolenie, ktoré sú súčasťou balenia. Nepoužívajte prístroj s manžetami alebo elektródami od iných výrobcov.

Možné vedľajšie účinky

- Možné vedľajšie účinky zahŕňajú podráždenie kože, zápal a popáleniny pod elektródami.

Zásah elektrickým prúdom (pri použití so sieťovým zdrojom, bez batérií)



VÝSTRAHA

Ako s každým elektrickým prístrojom, aj s EMS stimulátorom prekrvenia, je potrebné zaobchádzať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

Preto

- prístroj používajte len s dodaným sieťovým zdrojom a so sieťovým napätím uvedeným na sieťovom zdroji,
- nepoužívajte prístroj alebo príslušenstvo pokiaľ sú viditeľne poškodené,
- nepoužívajte prístroj počas búrky.

Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy, a odpojte ho z elektriny. Neťahajte za napájací kábel alebo za prístroj, ak chcete sieťový zdroj vytiahnuť zo zásuvky. Nikdy nedržte a nenoste prístroj za elektrický kábel. Dodržujte odstup medzi napájacím káblom a teplým povrchom. Napájací kábel neprivierajte, nezalamujte ani netočte. Do prístroja nezasúvajte žiadne ihly alebo ostré predmety.

Uistite sa, že prístroj, sieťový zdroj ani napájací kábel neprichádza do styku s vodou, parou ani inými tekutinami. Používajte prístroj len v suchých miestnostiach (napr. nikdy nie vo vani, saune).

V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky. Prístroj nepoužívajte, ak je prístroj alebo príslušenstvo viditeľne poškodené. Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.

Poškodenie



POZOR

- Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej opravě môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.
- V prípade poškodenia prístroj nepoužívajte a obráťte sa na Vášho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Na zaručenie účinnej funkcie prístroja by ste ho nemali nechať padnúť a nemali by ste ho rozkladať.
- Prístroj kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade, že sa takéto známky vyskytnú, alebo ak bol prístroj nesprávne použitý, je potrebné ho pred ďalším použitím doručiť výrobcovi alebo predajcovi.
- Okamžite vypnite prístroj, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy.
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj otvoriť a/alebo opraviť samostatne. Realizáciu opravy prenehajte zákazníkemu servisu alebo autorizovanému predajcovi. Pri nedodržaní pokynov záruka zaniká.
- Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.

Nebezpečenstvo požiaru



VÝSTRAHA

V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. v prípade nedodržania tohto návodu na obsluhu hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!

Preto

- prístroj nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom...
- nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.

Manipulácia



POZOR

Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.

Likvidácia



POZOR

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na orgán zodpovedný za likvidáciu. Použité a úplne vybité batérie musia byť zlikvidované prostredníctvom špeciálne označených zberných nádob, špeciálnych zberných miest alebo prostredníctvom predajne s elektronickým tovarom. Zo zákona máte povinnosť batérie likvidovať.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,

Cd = batéria obsahuje kadmium,




Hg = batéria obsahuje ortuť.



Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- ⚠ Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by mohli batérie prehltnúť a zadusiť sa nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!
- Dbajte na označenie polarít plus (+) a mínus (-).
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
- ⚠ Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádzte do ohňa.
- Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.
- Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
- Batérie vždy vymieňajte naraz.
- Nepoužívajte akumulátory!
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neštiepte.

4. Popis prístroja

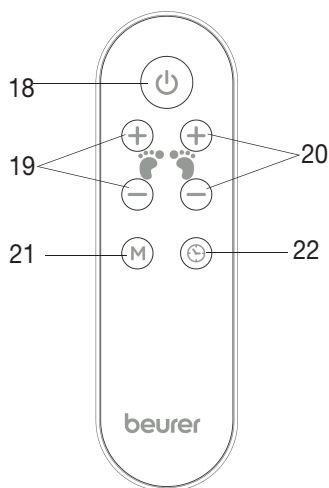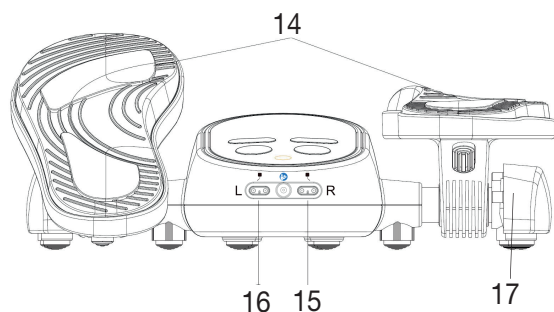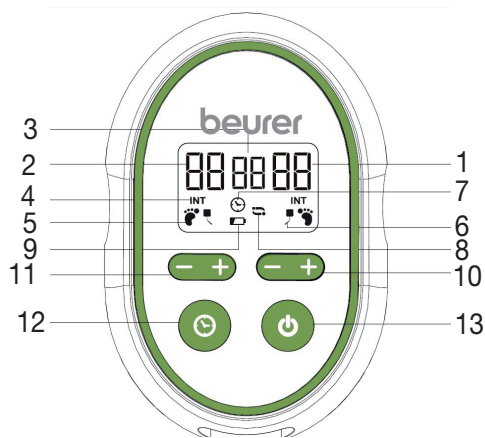

1. Stupeň intenzity vpravo (chodidlo/predkolenie)
2. Stupeň intenzity vľavo (chodidlo/predkolenie)
3. Zostávajúci čas aplikácie v minútach
4. Symbol intenzity
5. Režim stimulácie chodidla
6. Režim stimulácie chodidla a predkolenia
7. Symbol doby ošetrovania
8. Symbol meniacich sa režimov stimulácie
9. Symbol indikátora batérie
10. Zvýšenie/zníženie stupňa intenzity (chodidlo/predkolenie vpravo)
11. Zvýšenie/zníženie stuna intenzity (chodidlo/predkolenie vľavo)
12. Nastavenie doby ošetrovania
13. ⏻ Tlačidlo ZAP/VYP
14. Povrch elektródy chodidla
15. Pripojovacia zásuvka pre manžetu pravého predkolenia
16. Pripojovacia zásuvka pre manžetu ľavého predkolenia
17. Bočné vyťahovacie opierky pre krokovú funkciu

18. ⏻ Tlačidlo ZAP/VYP
19. Stupeň intenzity ľavá noha
20. Stupeň intenzity pravá noha
21. Tlačidlo režimu na výber jedného z 15 variantov vlny impulzov
22. Tlačidlo časovača

5. Uvedenie do prevádzky


i Upozornenie

Zariadenie môžete prevádzkovať s dodaným sieťovým adaptérom alebo batériami. Používanie sieťového adaptéra odporúčame z dôvodov trvalej udržateľnosti

Vloženie batérií

Ak chcete prístroj používať s batériami, musíte najskôr do EMS stimulátora prekrvenia vložiť batérie. Postupujte pritom nasledovne.


1. Otvorte kryt priehradky na batérie na spodnej strane EMS stimulátora prekrvenia.
2. Do priehradky na batérie vložte štyri batérie typu AA (1,5V). Dbajte na to, aby boli batérie vložené so správnou polaritou (+/-) ako je uvedené v priehradke na batérie.
3. Priehradku na batérie zatvorte tak, aby počuteľne a citelne zapadla.

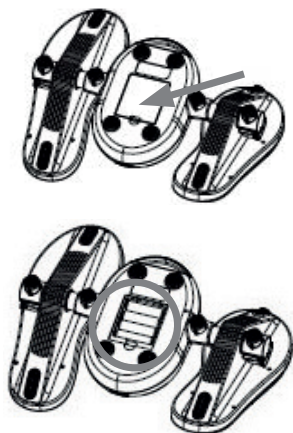

Vložte batérie do diaľkového ovládania

Ak chcete používať diaľkové ovládanie, musíte doň najskôr vložiť batérie. Postupujte pritom nasledovne.

1. Otvorte kryt priehradky na batérie na spodnej strane diaľkového ovládania tak, že pomocou špicatého predmetu zatlačíte západku smerom dozadu, čím ju uvoľníte.
2. Do priehradky na batérie vložte štyri batérie typu AAA (1,5V). Dbajte na to, aby boli batérie vložené so správnou polaritou (+/-) ako je uvedené v priehradke na batérie.
3. Priehradku na batérie diaľkového ovládania zatvorte tak, aby počuteľne a citelne zapadla.

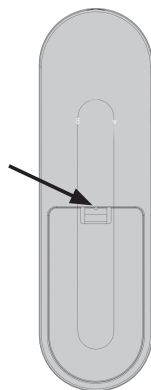

Pripojenie sieťového adaptéra

Ak chcete prístroj používať s dodaným sieťovým adaptérom, musíte najprv pripojiť sieťový adaptér k EMS stimulátoru prekrvenia. Postupujte nasledovne:

1. Pripojte kábel sieťového adaptéra k pripojovacej zásuvke EMS stimulátora prekrvenia.
2. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
3. Ak chcete prístroj používať len so sieťovým adaptérom, nekladajte doň batérie.

! **VÝSTRAHA** Nebezpečenstvo zakopnutia! Sieťový kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.

6. Použitie

Upozornenie





- S EMS stimulátorom prekrvenia môžete stimulovať nielen plochy chodidiel, ale aj predkolenie.
- EMS stimulátor prekrvenia používajte max. 90 minút denne. Pri dlhšom používaní môže priveľká stimulácia viesť k preťaženiu namiesto uvoľnenia.
- MS stimulátor prekrvenia sa po uplynutí nastaveného času používania automaticky vypne.

VÝSTRAHA



- EMS stimulátor prekrvenia používajte len v sede. EMS stimulátor prekrvenia nikdy nepoužívajte v stoji!


6.1 Stimulácia chodidla

Ak chcete spustiť stimuláciu nôh, postupujte nasledovne:


<p>Krok 1: Položte prístroj na podlahu</p> <ul style="list-style-type: none">• EMS stimulátor prekrvenia postavte na pevný a rovný povrch. Umiestnite stoličku do takej vzdialenosti pred EMS stimulátor prekrvenia, aby ste naň v sede pohodlne dosiahli nohami. <p> VÝSTRAHA Nebezpečenstvo zakopnutia! EMS stimulátor prekrvenia nikdy nepoužívajte v stoji..</p>	
<p>Krok 2: Položte obe chodidlá na prístroj</p> <ul style="list-style-type: none">• Umiestnite chodidlá (bosé) na plochy pre nohy na EMS stimulátore prekrvenia. Dbajte na to, aby sa klenba vášho chodidla nachádzala na strednom výstupku. Nezáleží na tom, či sú vaše nohy väčšie alebo menšie ako plochy pre nohy na EMS stimulátore prekrvenia. <p> POZOR Dbajte na to, aby vaše kolená v sede vytvárali uhol približne 90 stupňov.</p> <p>Kroková funkcia</p> <p>EMS stimulátor prekrvenia má tiež krokovú funkciu. Kroková funkcia umožňuje nakláňať nohy dopredu a dozadu počas elektrostimulácie. Dodatočný pohyb členku podporuje krvný obeh a znižuje opuch. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať elektrostimuláciu v spojení s krokovou funkciou.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ak chcete použiť krokovú funkciu, vyťahnite bočné opierky na prístroji. Plochy na nohy sa teraz dajú nakláňať dopredu a dozadu.• Ak je pre vás kroková funkcia nepríjemná alebo ju chcete ukončiť, zatlačte bočné opierky späť do prístroja tak, aby zacvakli na svoje miesto. Plochy na nohy môžete pevne uzamknúť v horizontálnej polohe alebo naklonené dopredu.	


Krok 3: Zapnutie prístroja

- Ak chcete zapnúť EMS stimulátor prekrvenia, stlačte tlačidlo  pre ZAP/VYP na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní. Na začiatku je na ľavej a pravej strane nastavená úroveň intenzity .

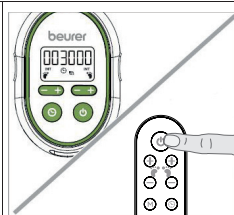


Krok 4: Nastavenie doby použitia


- Pomocou tlačidla  na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní vyberte požadovanú dobu trvania aplikácie. Dĺžku aplikácie môžete nastaviť na 5 až 90 minút (v 5minútových intervaloch).

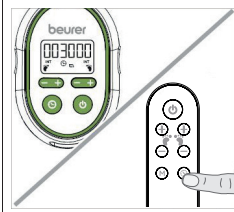

Krok 5: Spustenie aplikáciu/nastavenie stupňa intenzity

- Pomocou tlačidiel +/- na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný stupeň intenzity pre ľavú a pravú nohu. Môžete nastaviť stupeň intenzity od 1 do 99. Ak stlačíte tlačidlo +/- krátko, intenzitu môžete zvyšovať po krokoch. Ak podržíte tlačidlo +/- stlačené dlhšie, želaný stupeň intenzity dosiahnete rýchlejšie.

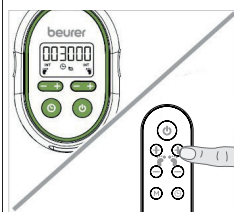

 **POZOR** Začnite s nízkym stupňom intenzity, aby ste si pomaly zvykli na prístroj.


- Ak elektrostimuláciu takmer necítite, jemne si navlhčíte chodidlá vodou. Tým sa dosiahne lepšia vodivosť prúdu. Nepoužívajte krémy ani emulzie, len vodu alebo gél na elektródy na báze vody.

Upozornenie


- Počas aplikácie beží každá z 15 rôznych variantov vlny impulzov v slučke po dobu jednej minúty. Ak chcete natrvalo nastaviť jeden z variantov vlny impulzov, stlačte tlačidlo **M** na diaľkovom ovládaní. Ak sa majú varianty vlny impulzov znovu striedať, opäť stlačte tlačidlo **M**.


Body-loose detection

- Ak zdvihnete chodidlá z plôch na nohy na EMS stimulátore prekrvenia na menej ako 5 sekúnd, z prístroja zaznejú tri krátke pípnutia. Hneď ako opäť položíte chodidlá na plochy na nohy, znova sa nastaví predtým nastavený stupeň intenzity.
- Ak zdvihnete chodidlá z plôch na nohy na EMS stimulátore prekrvenia na viac ako 5 sekúnd, stupeň intenzity sa nastaví na hodnotu 0. Ak chcete pokračovať v stimulácii, znova zvýšte stupeň intenzity na EMS stimulátore prekrvenia alebo na diaľkovom ovládaní.

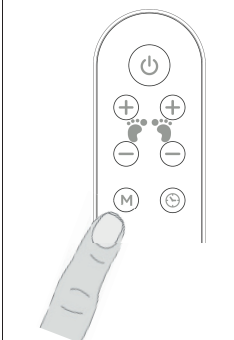


Krok 6: Vypnutie prístroja

- Ak chcete vypnúť EMS stimulátor prekrvenia, krátko stlačte tlačidlo  pre ZAP/VYP na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní.

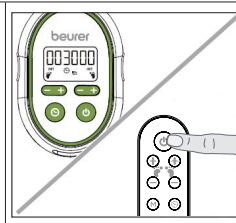

6.2 Stimulácia predkolenia

Ak chcete okrem chodidiel stimulovať aj predkolenia, postupujte takto:

Krok 1: Navlhčite manžety <ul style="list-style-type: none">• Vyberte obe manžety z obalu. Navlhčite obe manžety vodou alebo gélom na báze vody. Tým sa dosiahne lepšia vodivosť prúdu. Nepoužívajte krémy ani emulzie, len vodu alebo gél na elektródy na báze vody.	
Krok 2: Spojte pripojovací kábel s manžetou <ul style="list-style-type: none">• Pripojte pripojovací pripojenia k tlačidlu na manžete, ako je znázornené na obrázku. Skontrolujte, či je pripojovací kábel pevne spojený s manžetou.	
Krok 3: Spojte pripojovací kábel s prístrojom  VÝSTRAHA Skontrolujte, či je prístroj vypnutý. <ul style="list-style-type: none">• Zapojte pripojovacie káble do zásuviek L a R na prednej strane prístroja.	
Krok 4: Priloženie manžiet na predkolenie <ul style="list-style-type: none">• Položte manžety na predkolenie tak, ako je znázornené. Elektroda by mala ležať na lýtku a v závislosti od veľkosti nohy môže siahť až k holennej kosti.• Uistite sa, že manžety tesne priliehajú, no zároveň sú stále pohodlné. Položte pripojovacie káble tak, aby ste mohli ľahko pohybovať nohami hore a dole na plochách pre nohy prístroja.	
Krok 5: Spustenie stimulácie predkolenia <ul style="list-style-type: none">• Ak chcete začať so stimuláciou predkolenia, postupujte podľa krokov 1 až 6 v kapitole „6.1 Stimulácia chodidla“.	

7. Čistenie a uskladnenie

Čistenie



VÝSTRAHA


- Pred každým čistením vyťahnite sieťový zdroj zo zásuvky a odpojte ho od prístroja.
- Pred každým čistením vyberte batérie z EMS stimulátora prekrvenia.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
- Po každom použití vyčistite povrchy elektród EMS stimulátora prekrvenia a manžety handričkou alebo vlhkou špongiou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- Nechajte EMS stimulátor prekrvenia vysušiť pri izbovej teplote mimo dosahu tepla a slnečného žiarenia.
- EMS stimulátor prekrvenia použite opäť, až keď bude úplne suchý.

Uskladnenie

Ak EMS stimulátor prekrvenia nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zataženia. Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí, domácich zvierat a škodcov. Nekladte na EMS stimulátor prekrvenia žiadne predmety. Vyberte batérie z EMS stimulátora prekrvenia a diaľkového ovládania. Uistite sa, že sú dodržané podmienky skladovania v mieste uloženia.

8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Príčina	Odstránenie
EMS stimulátor prekrvenia sa nedá zapnúť.	Batérie sú prázdne.	Vymeňte batérie v EMS stimulátore prekrvenia.
	Batérie nie sú vložené správne.	Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené. Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-).
	EMS stimulátor prekrvenia nie je zapojený.	Pripojte sieťový adaptér k EMS stimulátoru prekrvenia a zapojte ho do vhodnej elektrickej zásuvky.
Diaľkové ovládanie nereaguje	Batérie sú prázdne.	Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní.
	Batérie nie sú vložené správne.	Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené. Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-).
EMS stimulátor prekrvenia je zapnutý, ale elektrická stimulácia nie je citelná	Vaše nohy sú príliš suché.	Navlhčite si spodnú časť chodidiel. V prípade potreby zvýšte stupeň intenzity.
Elektrická stimulácia je príliš slabá	Nastavený stupeň intenzity je príliš nízky.	Zvýšte stupeň intenzity.

Problém	Príčina	Odstránenie
Elektrická stimulácia je nepríjemná	Nastavený stupeň intenzity je príliš vysoký.	Znížte stupeň intenzity.
	EMS stimulátor prekrvenia sa nepoužíva v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.	Pred spustením aplikácie si prečítajte návod na obsluhu.
Lýtka a chodidlá sú po aplikácii bolestivé	Nastavený stupeň intenzity je príliš vysoký. Svaly sú preťažené.	Znížte stupeň intenzity. Medzi jednotlivými aplikáciami si urobte dostatok prestávok, aby sa svaly mohli zregenerovať.
Aplikácia bola prerušená	Batérie sú prázdne.	Vymeňte batérie v EMS stimulátore prekrvenia.
	EMS stimulátor prekrvenia sa po uplynutí nastaveného času používania automaticky vypne.	Na opätovné zapnutie EMS stimulátora prekrvenia stlačte tlačidlo  pre ZAP/ VYP.

9. Technické údaje

Typ	FM 250
Tvar výstupnej krivky	Dvojfázové obdĺžnikové impulzy
Frekvencia impulzov	10 Hz~36 Hz
Trvanie impulzov	250 μ s
Výstupné napätie	0 ~ 80 Vpp (pri 500 Ω)
Napájanie EMS stimulátor prekrvenia	Vstup sieťového adaptéra: 100–240 V~; 50/60 Hz 0,2 A; Výstup: DC 6,0 V; 300 mA; alebo DC 6,0 V; 4 x AA batérie
Napájanie diaľkového ovládania	DC 3,0 V; 2 x AAA batérie
Životnosť batérie	1 týždeň (pri dennom používaní 30 minút)
Kanály	2 kanály
Programy	1 program s 15 opakujúcimi sa variantami vlny impulzov
Doba aplikácie	5–90 minút (v 5minútových krokoch)
Stupne intenzity	1–99
Prevádzkové podmienky	5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu 30–75 %; 700 hPa–1060 hPa

Skladovacie a prepravné podmienky	-10 °C–55 °C (14 °F–131 °F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu 10–90 %; 700 hPa–1060 hPa
Rozmery	EMS stimulátor prekrvenia: cca 283,3 × 372,2 × 111,4 mm
Hmotnosť	1500 g (len EMS stimulátor prekrvenia, bez batérií)

Sériové číslo sa nachádza na zariadení alebo v priehradke na batérie.

Životnosť batérie: S dodanými batériami pri 500 Ω je možné použiť prístroj na cca 8 aplikácií v dĺžke 30 minút.

Upozornenie: Pri použití prístroja mimo jeho špecifikácie nie je zaručená jeho bezchybná funkcia! Vyhradzujeme si právo na technické zmeny za účelom zlepšovania a ďalšieho vývoja výrobku.

Tento prístroj je v súlade s európskymi normami EN60601-1 a EN60601-1-2 (súlad s CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) a podlieha osobitným opatreniam týkajúcim sa elektromagnetickej kompatibility. Myslite pritom na to, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu vplyvať na tento prístroj. Presnejšie informácie si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákaznickeho servisu.

Tento prístroj vyhovuje smernici EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS a zákonu o zdravotníckych výrobkoch. Pre tento prístroj nie je potrebná kontrola funkčnosti ani poučenie podľa § 10 nemeckého nariadenia o prevádzkovaní medicínskych produktov (MPBetreibV).

Informácie o elektromagnetickej kompatibilite



VÝSTRAHA

- Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých prostrediach uvedených v tejto príručke, vrátane domáceho prostredia.
- V prítomnosti elektromagnetického rušenia môže byť prístroj za určitých okolností používaný iba v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť napr. chybové hlásenia alebo porucha displeja/prístroja.
- Treba sa vyhnúť tomu, aby sa tento prístroj používal spolu s inými prístrojmi alebo s ďalšími prístrojmi v stohovanej forme, pretože to môže mať za následok chybný spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné použitie popísaným spôsobom, tento prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa presvedčili, že fungujú správne.
- Použitím iného príslušenstva ako toho, ktoré stanovil alebo zabezpečil výrobca tohto prístroja, môže mať za následok zvýšené rušivé elektromagnetické vyžarovanie alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť zariadenia a môže viesť k chybnému spôsobu prevádzky.
- Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne káble alebo externé antény) musia byť vzdialené aspoň 30 cm od všetkých častí prístroja, vrátane káblov, ktoré sú súčasťou balenia. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prístroja.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prístroja.

10. Záruka/servis

V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).

V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:

1. Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.
2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 - a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 - b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolanych osôb;
 - c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 - d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4. Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



649.37_FM250-2018-12-13_10_IM2_BEU_CS-SK