

beurer

IH 58 Kids



CS Inhalátor	
Návod k použití	2
SK Inhalátor	
Návod na použitie	14

Obsah

1. Seznámení	2
2. Vysvětlení symbolů	3
3. Varovné a bezpečnostní pokyny	3
4. Popis přístroje a příslušenství	5
5. Uvedení do provozu	6
6. Ovládání	6
7. Výměna filtru	8
8. Čištění a dezinfekce	8
9. Likvidace	10
10. Řešení problémů	10
11. Technické údaje	11
12. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	12
13. Záruka/servis	12

Obsah balení

Viz popis přístroje a příslušenství na straně 5.

- Inhalátor
- Rozprašovač
- Nasunovací figurka žirafy
- Spojovací díl
- Tlaková hadička
- Náustek
- Silikonová maska pro kojence
- Silikonová maska pro děti
- Kolénko
- Náhradní filtr
- Micro USB kabel
- Síťový adaptér
- Úložné pouzdro
- Tento návod k použití

1. Seznámení

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech tepla, určování hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Oblast použití

Tento inhalátor slouží k rozprašování tekutin a tekutých léků (aerosolů) a k léčbě horních a dolních cest dýchacích.

Rozprašováním a inhalací léku, předepsaného, resp. doporučeného lékařem, můžete předcházet onemocnění dýchacích cest, zmírňovat jeho symptomy a urychlovat léčbu. Další informace o možnostech použití získáte od svého lékaře nebo lékárníka.

Přístroj je vhodný pro inhalaci v domácím prostředí. Inhalaci léků byste měli provádět pouze podle pokynů lékaře. Inhalujte klidně a uvolněně a vdechujte pomalu a zhluboka, aby se lék mohl dostat až do jemných, hluboko uložených průdušek. Vydechněte normálně.

Přístroj je po úpravě schopen opětovného použití. Tato úprava zahrnuje výměnu veškerých dílů příslušenství, včetně rozprašovače a vzduchového filtru, a také dezinfekci povrchových částí běžným dezinfekčním prostředkem. Respektujte, že výměna všech dílů příslušenství se provádí v případech, kdy přístroj používá více osob.

Doporučujeme vyměnit rozprašovač a další příslušenství po jednom roce používání.

Přístroj se nemusí kalibrovat.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity tyto symboly:



Varování

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



Pozor

Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.



Upozornění

Upozornění na důležité informace.

Na obalu a na výrobním štítku přístroje a příslušenství jsou použity následující symboly.

	Příložná část typu BF
	Dodržujte návod k použití.
	Přístroj třídy ochrany 2
	Výrobce
I	Zapnuto
O	Vypnuto
SN	Sériové číslo
30 ON/ 30 OFF	Používání 30 minut, pak přestávka 30 minut před dalším použitím.
IP 22	Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před kapající vodou, pokud je kryt nakloněn až o 15°.
CE ₀₄₈₃	Značka CE potvrzuje shodu se základními požadavky směrnice 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky.
	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

3. Varovné a bezpečnostní pokyny



Varování

- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- V případě poruchy přístroje si přečtete kapitolu „10. Řešení problémů“.
- Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a léčbu. Proto vždy nejdříve každý druh bolesti nebo nemoci konzultujte se svým lékařem.
- Při zdravotních problémech jakéhokoliv druhu se obraťte na svého praktického lékaře!
- Při používání rozprašovače dodržujte obecně platná hygienická opatření.
- Typ použitého léku, dávkování, četnost a dobu trvání inhalace volte vždy podle pokynů lékaře.
- Používejte pouze léky předepsané nebo doporučené lékařem nebo lékárníkem.
Prosím nezapomeňte:
Pro léčbu používejte jen díly, které uvedl lékař podle stavu vaší nemoci.
- Na příbalovém letáku k danému léku zkontrolujte, zda neexistuje kontraindikace pro užívání s běžnými systémy pro aerosolovou terapii.
- Přestane-li přístroj správně fungovat, dostaví-li se nevolnost nebo bolesti, okamžitě aplikaci přerušete.
- Přístroj držte při používání v dostatečné vzdálenosti od očí, protože rozprašovaný lék by na ně mohl mít škodlivý účinek.
- Na přístroji se nesmí provádět žádné změny.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů, kyslíku nebo oxidu dusnatého.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými (např. ztráta citlivosti) nebo duševními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi. Výjimkou je, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruktorem, jak přístroj používat.

- Na příbalovém letáku k léku zkontrolujte, zda neexistuje kontraindikace pro užívání s běžnými systémy pro aerosolovou terapii.
- Před každým čištěním a/nebo údržbou se přístroj musí vypnout a vypojit ze zásuvky.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Kvůli nebezpečí zamotání se do kabelů nebo hadiček či uškrcení se jimi uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil.
- Přístroj se smí připojit pouze k síťovému napětí, které je uvedeno na výrobním štítku.
- Nevkládejte přístroj do vody a nepoužívejte ho ve vlhkých prostorách. V žádném případě do přístroje nesmí vniknout tekutina.
- Chraňte přístroj před silnějšími nárazy.
- Nikdy se nedotýkejte vlhkýma rukama micro USB kabelu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Síťový adaptér nevytahujte ze zásuvky za micro USB kabel.
- Nikdy nesmí u micro USB kabelu dojít ke skřípnutí, lámání, tažení přes ostré hrany, prověšení, musí se také chránit před horkem.
- Doporučujeme zcela odmotat micro USB kabel, aby se zabránilo nebezpečnému přehřátí.
- Pokud se micro USB kabel nebo síťový adaptér poškodí, musí se odstranit. Obráťte se na zákaznický servis nebo na prodejce.
- Při otevírání přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odpojení od elektrické sítě je zajištěno pouze v případě, že je adaptér vytážen ze zásuvky a že je přerušeno jakékoliv síťové propojení přes micro USB kabel.
- Na přístroji ani na jeho příslušenství se nesmí provádět žádné změny.
- Pokud přístroj spadl na zem nebo byl vystaven extrémní vlhkosti či byl poškozen jiným způsobem, nesmí se dále používat. V případě pochybností kontaktujte zákaznický servis nebo prodejce.
- Inhalátor IH 58 Kids se může používat pouze s vhodnými rozprašovači Beurer a odpovídajícím příslušenstvím firmy Beurer. Použití jiných rozprašovačů nebo

příslušenství by mohlo vést ke snížení terapeutického účinku a případně k poškození přístroje.

- Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pozor

- Výpadky proudu, náhlé poruchy, popř. jiné nepříznivé podmínky by mohly vést k provozní neschopnosti přístroje. Proto se doporučuje mít k dispozici náhradní přístroj, resp. lék (doporučený lékařem).
- Pokud bude zapotřebí adaptér nebo prodlužovací kabel, musí obojí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Nesmí se překročit mezní proudový výkon ani maximální výkonová mez uvedená na adaptéru.
- Přístroj a napájecí kabel nesmí být uloženy v blízkosti tepelných zdrojů.
- Přístroj se nesmí používat v prostorech, ve kterých se předtím používaly spreje. Před zahájením terapie je nutno tyto prostory vyvětrat.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, jestliže vydává neobvyklý hluk.
- Z hygienických důvodů je bezpodmínečně nutné, aby každý uživatel používal své vlastní příslušenství.
- Po použití vždy odpojte síťový adaptér od přístroje.
- Přístroj uložte na místě chráněném před povětrnostními vlivy. Přístroj je nutno uchovávat ve stanovených podmínkách prostředí.

Obecné pokyny

Pozor

- Přístroj používejte výlučně:
 - u člověka,
 - k účelu, ke kterému byl vyvinut (aerosolová inhalace), a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.
- **Jakékoli neodborné použití může být nebezpečné!**
- U akutních případů má první pomoc přednost.
- Kromě léků používejte pouze destilovanou vodu nebo solný roztok. Jiné kapaliny by mohly za určitých okolností způsobit poškození inhalátoru nebo rozprašovače.
- Tento přístroj není určen k použití v komerční oblasti nebo na klinikách, ale výhradně k použití v domácím prostředí!

Před uvedením do provozu



Pozor

- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj chraňte před prachem, nečistotami a vlhkostí, v žádném případě přístroj během provozu nezakrývejte.
- Přístroj nepoužívejte v nadměrně prašném prostředí.
- Přístroj ihned vypněte, pokud je poškozený nebo objeví-li se nějaká porucha.
- Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným používáním.

Opravy




Upozornění

- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

4. Popis přístroje a příslušenství

Přehled součástí inhalátoru

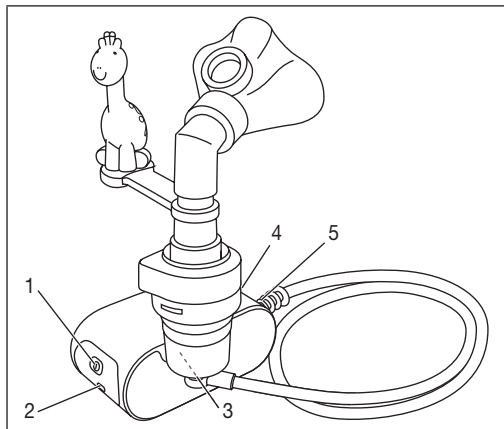

- 1 Vypínač
- 2 Připojka micro USB
- 3 Držák rozprašovače
- 4 Uzávěr filtru s filtrem
- 5 Připojka hadičky

Přehled součástí rozprašovače a jeho příslušenství



- 6 Tlaková hadička
- 7 Rozprašovač
- 8 Zásobník na léky
- 9 Vložka rozprašovače
- 10 Nástavec rozprašovače
- 11 Náustek
- 12 Silikonová maska pro děti
- 13 Silikonová maska pro kojence
- 14 Kolénko
- 15 Nasunovací figurka žirafy
- 16 Spojovací díl
- 17 Náhradní filtr
- 18 USB kabel
- 19 Síťový adaptér USB

i Upozornění

Inhalátor IH 58 Kids mohou používat i dospělí. Dospělí mají možnost používat s inhalátorem samostatné příslušenství (náustek, svorka na nos, maska pro dospělé, maska pro děti, rozprašovač, tlaková hadička, filtr). Toto příslušenství není součástí balení inhalátoru IH 58 Kids [n.s.]. Používání svorky na nos a dalšího příslušenství však zde bude popsáno. Přehled všech výrobků k dokoupení naleznete v kapitole „12. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení“.

5. Uvedení do provozu


Instalace

Vyjměte přístroj z obalu.
Položte ho na rovnou plochu.


Před prvním použitím

i Upozornění

- Před prvním použitím by se měl rozprašovač s příslušenstvím vyčistit a vydezinfikovat. Viz kapitola „Čištění a dezinfekce“ na straně 8.
Spojovací díl [16] s odnímatelnou nasunovací figurkou žirafy [15] se může nasunovat na rozprašovač. Při upevňování rozprašovače k přístroji v kombinaci se spojovacím dílem [16] a odnímatelnou nasunovací figurkou žirafy [15] dbejte na to, aby bylo těžiště nad přístrojem. Jinak hrozí nebezpečí převrácení přístroje. Příkladem je titulní obrázek v tomto návodu k použití.
- Připojte tlakovou hadičku [6] dole k zásobníku na léky [8].

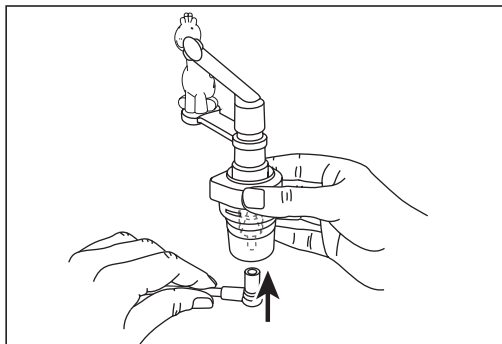

- Zasuňte druhý konec tlakové hadičky [6] jemným otáčivým pohybem do přípojky hadičky [5] na inhalátoru.

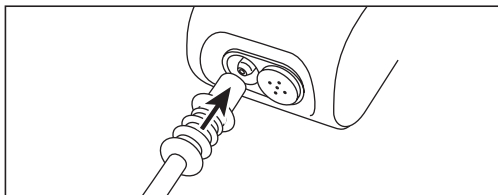

Zapnutí inhalátoru

Inhalátor se zapíná takto:

- Zasuňte micro USB kabel, který je součástí balení, do přípojky micro USB na inhalátoru. Zasuňte druhý konec micro USB kabelu do USB přípojky na síťovém adaptéru a ten zapojte do zásuvky.
- Stiskněte vypínač na inhalátoru. Vypínač začne modře blikat. Inhalátor je nyní v provozu.

6. Ovládání

! Pozor


- Z hygienických důvodů je bezpodmínečně nutné, abyste rozprašovač [7] a příslušenství po každém použití vyčistili a po posledním použití v daný den vydezinfikovali.
- Jednotlivé díly příslušenství může používat jen jedna osoba; nedoporučujeme, aby je používalo více osob.
- Pokud by se mělo při terapii inhalovat několik různých léků za sebou, je třeba pamatovat na to, že se rozprašovač [7] musí po každém použití propláchnout teplou vodou z vodovodu. Viz kapitola „Čištění a dezinfekce“ na straně 8.
- Dodržujte pokyny pro výměnu filtru uvedené v tomto návodu k použití!
- Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda je hadička pevně připojená k inhalátoru [5] a rozprašovači [7].
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda správně funguje. Na chvilku zapněte inhalátor (s připojeným rozprašovačem, ale bez léků). Jestliže z rozprašovače [7] proudí vzduch, je přístroj plně funkční.

6.1 Nasazení vložky rozprašovače

- Otevřete rozprašovač [7] tak, že otočíte jeho horní část proti směru hodinových ručiček a proti zásobníku na léky [8]. Nasadte vložku rozprašovače [9] do zásobníku na léky [8].
- Ujistěte se, že kužel pro vedení léku dobře sedí na kuželu pro vedení vzduchu ve vnitřní části rozprašovače.
- Ujistěte se, že je nástavec rozprašovače [10] umístěn v horní části rozprašovače.

6.2 Naplnění rozprašovače

- Zásobník na léky [8] naplňte izotonickým solným roztokem nebo lékem. Dávejte pozor na přeplnění! Maximální doporučené množství je 6 ml!
- Používejte léky jen podle pokynů lékaře a zeptejte se na odpovídající délku a četnost inhalace!
- Jestliže je předepsané množství léku menší než 2 ml, doplňte ho izotonickým solným roztokem minimálně na 2 ml. Zředění je rovněž důležité u viskózních léků. I v tomto případě dodržujte pokyny lékaře.

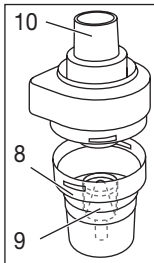

6.3 Zavření rozprašovače

- Zavřete rozprašovač [7] tak, že otočíte jeho horní částí ve směru hodinových ručiček proti zásobníku na léky [8]. Dbejte na správné spojení!

6.4 Spojení příslušenství s rozprašovačem

- Propojte rozprašovač [7] s požadovaným příslušenstvím. Náustek [11] nebo svorka na nos [n.s.] se mohou používat s nástavcem rozprašovače [10]. Masky pro děti [12] a masky pro kojence [13] se musí k rozprašovači připojit pomocí kolénka [14].

Upozornění

Inhalace s náustkem je neúčinnější formou terapie. Použití masky k inhalaci se doporučuje jen tehdy, jestliže nelze použít náustek (např. u dětí, které ještě neumí náustkem inhalovat).

Dbejte na to, aby maska k inhalaci dobře přiléhala k obličejí a oči zůstaly volné.

- Vysuňte rozprašovač [7] před použitím směrem nahoru z držáku [3].
- Zapněte inhalátor pomocí vypínače [1].
- Proudění mlhy z rozprašovače je znakem správného provozu.

6.5 Inhalování

- Podržte ošetřované dítě pokud možno ve vzpřímené poloze nebo ho posadte. Nepoužívejte přístroj, jestliže dítě leží.
- Během inhalování by starší děti a dospělí měli sedět rovně a uvolněně u stolu, a ne v křesle, aby nedošlo ke stlačování dýchacích cest a omezení účinků terapie.
- Zhluboka vdechujte rozprašovaný lék.

Pozor

Přístroj není vhodný k dlouhodobému provozu, po 30 minutách používání se musí na 30 minut vypnout.

Upozornění

Během terapie držte rozprašovač rovně (svisle), jinak nebude fungovat rozprašování a nebude zaručena správná funkce přístroje.

Uvedená doba inhalace se může měnit podle stavu nabití akumulátoru a použitého příslušenství.

Pozor

Éterické oleje z léčivých rostlin, sirupy proti kašli, roztoky ke kloktání, kapky k potírání nebo do parní lázně jsou pro inhalaci pomocí inhalátorů zásadně nevhodné. Tyto přísady jsou často husté a mohou negativně ovlivnit správnou funkci přístroje, a tedy také účinnost použití. Při přecitlivělosti průduškového systému mohou léky s éterickými oleji za určitých okolností vyvolat akutní bronchiální spasmus (náhlé křečovitě zúžení průdušek s dušností). Informujte se u svého lékaře nebo lékárníka!

6.6 Ukončení inhalace

Jestliže bude mlha proudit z přístroje již jen nepravidelně nebo změnil se zvuk přístroje při inhalaci, můžete léčbu ukončit.

- Po terapii inhalátor vypněte vypínačem [1] a odpojte ho od elektrické sítě.

- Po skončení terapie rozprašovač [7] opět vložte zpět do držáku [3].

6.7 Čištění

Viz kapitola „Čištění a dezinfekce“ na straně 8.

7. Výměna filtru

Při běžných podmínkách používání je třeba vyměnit vzduchový filtr asi po 100 provozních hodinách nebo po jednom roce. Pravidelně kontrolujte vzduchový filtr (po 10–12 rozprašováních). V případě silného znečištění nebo ucpání použitý filtr vyměňte. Pokud by filtr navlhnul, musíte ho rovněž vyměnit za nový.

Pozor


- Nepokoušejte se použítý filtr vyčistit a opět používat!
- Používejte pouze originální filtry výrobce, jinak by se mohl inhalátor poškodit nebo by nebylo možné zaručit dostatečně účinnou terapii.
- Vzduchový filtr se nesmí opravovat ani se nesmí provádět jeho údržba v okamžiku, kdy je přístroj používán k terapii.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez filtru.

Při výměně filtru postupujte takto:

Pozor

- Nejdříve vypněte přístroj a odpojte ho od sítě.
- Počkejte, dokud přístroj nevychladne.

1. Uzávěr filtru [4] vsuňte směrem dopředu.

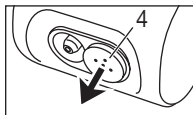

Upozornění

Pokud filtr zůstane po vysunutí uzávěru v přístroji, vyměňte ho například pinzetou nebo podobným nástrojem.

2. Nasadte závěr filtru [4] s novým filtrem.
3. Zkontrolujte pevné uložení.

8. Čištění a dezinfekce

Rozprašovač a příslušenství

Varování

Dodržujte následující hygienické předpisy, abyste zabránili zdravotním problémům.


- Rozprašovač [7] a jeho příslušenství jsou určeny k opakovanému použití. Vezměte na vědomí, že v různých oblastech použití jsou kladeny různé požadavky na čištění a hygienickou přípravu pro další použití.

Upozornění:

- Neprovádějte mechanické čištění rozprašovače nebo jeho příslušenství kartáčkem ani ničím podobným, protože by přitom mohly vzniknout neopravitelné škody a nebyl by ani zaručen žádoucí léčebný účinek.
- Další požadavky ohledně nutné hygienické přípravy (péče o ruce, manipulace s léky, resp. inhalačními roztoky) u vysoce rizikových skupin (např. pacientů s mukoviscidózou) si prosím zjistěte u svého lékaře.
- Dbejte na dostatečné osušení po každém čištění a dezinfekci. Zbytková vlhkost může představovat zvýšené riziko pro množení mikroorganismů.

Příprava

- Ihned po skončení inhalace se musí všechny části rozprašovače [7] i použité příslušenství vyčistit od zbytků léků a nečistot.
- Sejměte náustek [11], masku [12, 13] nebo svorku na nos [n.s.] z rozprašovače.
- Rozmontujte svorku na nos [n.s.], pokud jste ji použili v kombinaci s komfortním nástavcem.
- Sejměte masky [12, 13] z kolénka [14].
- Rozmontujte rozprašovač [7] tak, že otočíte jeho horní část proti směru hodinových ručiček a proti zásobníku na léky [8].
- Sejměte vložku rozprašovače [9] ze zásobníku na léky [8]. Sejměte nástavec rozprašovače [10].
- Smontování jednotlivých dílů pak probíhá v opačném pořadí kroků.

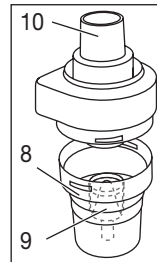

Čištění



Pozor

Před každým čištěním musí být přístroj vypnutý, odpojený od elektrické sítě a vychladlý.

Rozprašovač i použité **příslušenství**, např. náustek, maska atd., je nutno po každé inhalaci očistit horkou, ale ne vroucí vodou. Součásti pečlivě osušte měkkou utěrkou. Když budou díly úplně suché, složte je opět dohromady a vložte do suchého, utěsněného obalu nebo proveďte dezinfekci.

Při každém čištění se ujistěte, že jste odstranili všechny zbytky léků a nečistot. V žádném případě nepoužívejte látky, které by mohly být nebezpečné při kontaktu s pokožkou či sliznicemi, příp. po požití nebo vdechnutí. K čištění **přístroje** používejte jemnou, suchou utěrkou a neabrazivní čisticí prostředky.

Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky a nikdy přístroj neumývejte pod vodou.



Pozor

- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná voda!
- Přístroj ani jednotlivé příslušenství neumývejte v myčce na nádobí!
- Přístroje v zapnutém stavu se nedotýkejte vlhkými rukama; na přístroj nesmí stříkat voda. Přístroj můžete používat jen tehdy, pokud je úplně suchý.
- Kapalina, která by do nich vnikla, by mohla poškodit elektroniku i další součásti inhalátoru a způsobit poruchu funkčnosti.

Kondenzovaná voda, údržba hadičky

Podle příslušných okolních podmínek se může v hadičce usazovat kondenzovaná voda. Pro zabránění množení mikroorganismů a zajištění bezproblémové terapie je bezpodmínečně nutné odstranit veškerou vlhkost. Postupujte takto:

- Sejměte tlakovou hadičku [6] z rozprašovače [7].
- Na straně inhalátoru nechejte hadičku [5] zasunutou.
- Nechejte inhalátor zapnutý tak dlouho, dokud není díky proudícímu vzduchu vlhkost odstraněna.
- V případě silného znečištění hadičku vyměňte.

Dezinfekce

Při dezinfekci rozprašovače a jeho příslušenství postupujte pečlivě podle níže uvedených bodů. Doporučujeme dezinfekci jednotlivých částí nejpozději po posledním použití v daný den.

(Potřebujete k tomu jen trochu bezbarvého octa a destilovanou vodu!)

- Nejdříve vyčistěte rozprašovač a jeho příslušenství podle popisu v kapitole „Čištění“.
- Rozložený rozprašovač [7], náustek [11], silikonové masky [12,13] a rozloženou svorku na nos [n.s.] vložte na 5 minut do vroucí vody.
- Pro ostatní příslušenství použijte octový roztok ve složení ¼ dílu octa a ¾ dílu destilované vody. Ujistěte se, že množství roztoku stačí k tomu, aby v něm byly jednotlivé díly, tedy masky z PVC [n.s.] a hadička [6] úplně ponořeny. Příslušenství, které se může vyvařovat, je možné tímto způsobem dezinfikovat.
- Ponechte díly 30 minut v octovém roztoku.
- Jednotlivé díly omyjte vodou a pečlivě je osušte jemnou utěrkou.



Pozor

Tlakovou hadičku a masky z PVC [n.s.] nevyvářejte ani nesterilizujte v autoklávu.

- Když budou díly úplně suché, složte je opět dohromady a uložte do suchého, utěsněného obalu.



Upozornění

- Uvědomte si prosím, že po čištění musí všechny díly řádně oschnout, protože jinak se zvyšuje nebezpečí množení mikroorganismů.
- Použijte dezinfekčního roztoku podle pokynů výrobce.

Sušení

- Jednotlivé součásti rozložte na suchý, čistý a savý podklad a nechte je úplně uschnout (minimálně 4 hodiny).

Odolnost materiálu

- Rozprašovač a díly příslušenství podléhají při častém používání a po hygienickém ošetření určitému opotřebení právě tak jako jakékoli jiné plastové díly. To může během času vést ke změně aerosolu, a tedy k negativ-

nímu ovlivnění efektivity terapie. Doporučujeme proto vyměnit rozprašovač a další příslušenství nejpozději po jednom roce používání.

- Při výběru čistících, resp. dezinfekčních prostředků je třeba dbát následujících pokynů: Používejte pouze jemné čistící nebo dezinfekční prostředky a dávkujte je podle pokynů výrobce.

Uložení

- Neskladujte ve vlhkých prostorách (např. v koupelně) a nepřpravujte společně s vlhkými předměty.
- Při skladování a přepravě chraňte před trvalým přímým slunečním zářením.
- Příslušenství můžete ukládat do příslušné přihrádky v přístroji. Přístroj uchovávejte na suchém místě, nejlépe v originálním obalu.

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být přístroj likvidován spolu s domácím odpadem. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.




10. Řešení problémů

Problémy/ otázky	Možné příčiny / odstranění problému
Rozprašovač nevytváří žádný aerosol nebo vytváří jen malé množství.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Příliš mnoho nebo málo léků v rozprašovači. Minimum: 2 ml, maximum: 6 ml. 2. Zkontrolujte, zda není ucpaná tryska. Případně vyčistěte trysku (např. ji vypláchněte). Poté opět spusťte rozprašovač. POZOR: Propichujte opatrně jemné otvory jen na spodní straně trysky. 3. Nedržíte rozprašovač svisle. 4. Použili jste inhalační kapalinu nevhodnou pro rozprašování (např. příliš hustou). Inhalační kapalinu by měl předepsat lékař.
Výstupní tlak je příliš slabý.	Zalomená hadička, ucpaný filtr, příliš mnoho inhalačního roztoku.
Které léky lze inhalovat?	Poradte se se svým lékařem. V zásadě se mohou inhalovat všechny léky, které jsou vhodné a schválené pro inhalaci pomocí přístroje.
V rozprašovači zůstává inhalační roztok.	Vyplyvá to z technického řešení a nejde o chybu. Ukončete inhalaci, jakmile uslyšíte výrazně jiný zvuk rozprašovače.

Problémy/ otázky	Možné příčiny / odstranění problému
Na co je třeba dbát u kojenců a dětí?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aby byla zajištěna efektivní inhalace, měla by maska u kojenců a dětí zakrývat ústa a nos. 2. U větších dětí by maska rovněž měla zakrývat ústa a nos. Rozprašování u spících osob je málo účinné, protože se přitom do plic nemůže dostat dostatečné množství léku. <p>Upozornění: Děti by měly inhalovat pouze pod dozorem a za pomoci dospělé osoby a neměly by se nechávat samotné.</p>
Proč se má rozprašovač pravidelně měnit?	<p>Existují dva důvody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K zajištění účinného spektra částic z terapeutického hlediska by otvor trysky neměl přesáhnout stanovený průměr. Mechanickým a tepelným namáháním podléhají plasty určitému opotřebení. Vložka rozprašovače [9] je velmi citlivý díl. Na základě opotřebení může dojít ke změně složení kapiček aerosolu, což bezprostředně ovlivňuje účinnost léčby. 2. Kromě toho doporučujeme pravidelnou výměnu rozprašovače z hygienických důvodů.
Potřebuje každý uživatel vlastní rozprašovač?	Je to bezpodmínečně nutné z hygienických důvodů.

11. Technické údaje


Model	IH 58 Kids
Typ	IH 58
Rozměry (š × v × h)	110 × 62 × 47 mm
Hmotnost	176 g

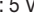Pracovní tlak	cca 0,25 – 0,5 baru
Objem náplně rozprašovače	min. 2 ml max. 6 ml
Proudění léku	cca 0,25 ml/min
Hladina akustického tlaku	max. 45 dBA (podle normy DIN EN 13544-1 kap. 26)
Připojení k síti	vstup: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; 0,5 A výstup: 5 V  ; 2 A
Předpokládaná životnost	400 h
Provozní podmínky	Teplota: +10 °C až +40 °C Relativní vlhkost vzduchu: 10 – 95 % Okolní tlak: 700 – 1 060 hPa
Skladovací a přepravní podmínky	Teplota: -20 °C až +60 °C Relativní vlhkost vzduchu: 10 – 95 % Okolní tlak: 700 – 1 060 hPa
Vlastnosti aerosolu	1) Dávkování aerosolu: 0,15 ml 2) Rychlost dávkování aerosolu: 0,03 ml/min 3) Velikost částic (MMAD): 4,12 μm

Sériové číslo se nachází na přístroji nebo v příhradce na baterie.

Technické změny vyhrazeny.

Histogram velikosti částic

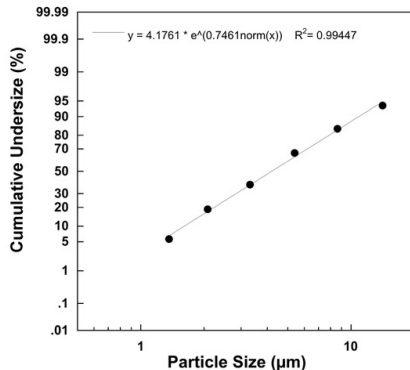

Tato měření byla provedena s roztokem fluoridu sodného pomocí přístroje „Next Generation Impactor“ (NGI).

Diagram proto eventuálně nemusí být aplikovatelný na suspenze nebo velmi husté léky. Bližší informace můžete získat od příslušného výrobce léku.

12. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Název	Materiál	REF (obj. č.)
Yearpack IH 58 Kids (obsahuje náustek, silikonovou masku pro děti, silikonovou masku pro kojence, rozprašovač, tlakovou hadičku, filtr)	PP/PVC/ silikon	602.18
Yearpack IH 58 Standard (obsahuje náustek, svorku na nos, masku pro dospělé, masku pro děti, rozprašovač, tlakovou hadičku, filtr)	PP/PVC	602.15
Maska pro kojence	PVC	601.31
Nasunovací figurka žirafy	PP/ PVC	164.182

Upozornění

Při použití přístroje mimo specifikaci není zaručeno jeho správné fungování! Technické změny v rámci zlepšování a dalšího vývoje výrobku jsou vyhrazeny. Tento přístroj a jeho příslušenství odpovídá evropských normám EN60601-1 a EN60601-1-2 (CISPR 11, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-7, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11) a EN13544-1 a podléhá zvláštním preventivním opatřením, která se týkají elektromagnetické kompatibility. Přístroj odpovídá požadavkům evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC, zákonu o zdravotnických prostředcích.

POZNÁMKY K ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

- Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Přístroj lze při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit

chybová hlášení nebo může dojít k výpadku displeje/ přístroje.

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů nebo s přístroji naskládanými na sobě, neboť by mohlo dojít k chybnému způsobu provozu. Pokud by však bylo použití ve výšce uvedené podobně nutné, měli byste tento přístroj i ostatní přístroje sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost přístroje a způsobit chybný způsob provozu.

13. Záruka/servis

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím. Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 5 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.

Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz příložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit

- kopii faktury / doklad o nákupu
- originální výrobek společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na

- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebovují nebo spotřebovují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);
- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.

Obsah

1. Oboznámenie sa s prístrojom	14
2. Vysvetlenie symbolov	15
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	15
4. Popis prístroja a príslušenstva	17
5. Uvedenie do prevádzky	18
6. Obsluha	19
7. Výmena filtra	20
8. Čistenie a dezinfekcia	20
9. Likvidácia	22
10. Riešenie problémov	22
11. Technické údaje	23
12. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu	24
13. Záruka/servis	25

Obsah balenia

Pozri popis prístroja a príslušenstva na strane 17.

- Inhalátor
- Rozprašovač
- Nástrčná figúrka „žirafa“
- Spájací kus
- Hadička na stlačený vzduch
- Náustok
- Silikónová detská maska
- Silikónová detská maska
- Uhlová tvarovka
- Náhradný filter
- Mikro-USB kábel
- Sieťový adaptér
- Úložná taštička
- Tento návod na použitie

1. Oboznámenie sa s prístrojom

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže a vzduchu.

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

Oblasť použitia

Tento inhalátor je inhalačný prístroj určený na rozprašovanie kvapalín a kvapalných liečiv (aerosóly) a na liečbu horných a dolných dýchacích ciest.

Rozprašovaním a inhaláciou liečiv predpísaných, prípadne odporúčaných lekárom môžete predchádzať ochoreniam dýchacích ciest, zmierňovať ich sprievodné príznaky a urýchliť liečbu. Ďalšie informácie o možnostiach použitia získate u svojho lekára alebo lekárnik.

Prístroj je vhodný na inhaláciu v domácnosti. Inhalácia liečiv by sa mala vykonávať iba podľa pokynov lekára. Inhaláciu vykonávajte v pokoji a uvoľnení, vdychujte pomaly a zhlboka, aby liečivo mohlo preniknúť hlboko do jemných priedušiek. Vydychujte normálne.

Prístroj je po príprave vhodný na opätovné použitie. Príprava zahŕňa výmenu všetkých dielov príslušenstva vrátane rozprašovača a vzduchového filtra, ako aj dezinfekciu povrchu prístroja pomocou bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov. Dbajte na to, aby sa vykonávala výmena všetkých dielov príslušenstva, keď prístroj používa viacero osôb.

Rozprašovač a ďalšie príslušenstvo odporúčame vymeniť najneskôr po jednom roku.

Prístroj sa nemusí kalibrovať.

2. Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na použitie sa používajú nasledujúce symboly.



Výstraha

Výstražné upozornenie poukazuje na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenia vášho zdravia.



Pozor

Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.



Upozornenie

Upozornenie na dôležité informácie.

Na obale a na typovom štítku prístroja a príslušenstva sa používajú nasledovné symboly.

	Aplikačná časť typ BF
	Dodržiujte návod na použitie
	Trieda ochrany 2
	Výrobca
I	Zapnuté
O	Vypnuté
SN	Sériové číslo
30 ON/ 30 OFF	30-minútová prevádzka, následne 30-minútová prestávka pred opätovným spustením prevádzky.
IP 22	Chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším a pred kvapkajúcou vodou, keď je kryt naklonený max. 15°.
CE ₀₄₈₃	Symbol CE potvrdzuje súlad so základnými požiadavkami smernice 93/42/EEC o zdravotníckych pomôckach.
	Obal ekologicky zlikvidujte
— — —	Jednosmerný prúd



Striedavý prúd

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia



VÝSTRAHA

- Pred použitím prístroja je potrebné sa uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznickeho servisu.
 - Pri poruchách prístroja pozri kapitolu „10. Riešenie problémov“.
 - Použitie prístroja nenahrádza konzultáciu s lekárom a liečbu. V prípade akejkoľvek bolesti alebo ochorenia sa preto vždy najskôr poraďte so svojim lekárom.
 - V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa zdravia sa poraďte so svojim lekárom!
 - Pri použití rozprašovača dodržiavajte všeobecné hygienické opatrenia.
 - Vždy dodržiavajte dávkovanie, frekvenciu a dobu inhalácie pre daný typ používaného liečiva podľa pokynov lekára.
 - Používajte iba liečivá predpísané alebo odporúčané lekárom alebo lekárnikom.
- Dozriavajte:**
Pri ošetrovaní používajte iba diely stanovené lekárom na základe zdravotného stavu.
- Na príbalovom letáku lieku skontrolujte, či existujú kontraindikácie pre použitie s bežnými systémami na aerosólovú terapiu.
 - Ak prístroj nefunguje správne alebo sa vyskytla nevoľnosť alebo bolesť, okamžite prerušte používanie.
 - Počas použitia sa s prístrojom nepribližujte k očiam, pretože hmla zložená z liečiva môže pôsobiť škodlivo.
 - Na prístroji sa nesmú vykonávať žiadne zmeny.
 - Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov, kyselika alebo oxidov dusíka.
 - Tento prístroj nie je určený na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými (napr. necitlivosť na bolesť) alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo s nedostatčnými vedomosťami. To neplatí, ak sú tieto osoby

pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj správne používať.

- Skontrolujte kontraindikácie v príbalovom letáku liečiva pri používaní s bežnými systémami na aerosólovú terapiu.
- Pred každým čistením a/alebo údržbou sa prístroj musí vypnúť a zástrčka sa musí vytriahnuť zo zásuvky.
- Obal uchovávať mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía).
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu zachytenia a uškrtenia, káble a vzduchové vedenia uchovávať mimo dosahu malých detí.
- Nepoužívajte žiadne prídavné diely, ktoré neodporúča výrobca.
- Prístroj sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku.
- Prístroj neponárajte do vody a nepoužívajte ho v priestoroch s vysokou vlhkosťou. Do prístroja v žiadnom prípade nesmú preniknúť kvapaliny.
- Chráňte prístroj pred silnejšími nárazmi.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťového kábla mokrymi rukami, pretože by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Sieťový adaptér nevyťahujte zo zásuvky za mikro-USB kábel.
- Mikro-USB kábel neprivierajte, nelámte, nefahajte cez predmety s ostrými hranami, nenechávajte visieť a chráňte ho pred vysokými teplotami.
- Mikro-USB kábel odporúčame kompletne odvinúť, aby sa predišlo nebezpečnému prehriatiu.
- Ak je mikro-USB kábel alebo sieťový adaptér poškodený, musí sa zlikvidovať. Obráťte sa na zákaznicky servis alebo obchodníka.
- Pri otvorení prístroja hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Odpojenie od elektrickej siete je zaručené len vtedy, keď je adaptér vytriahnutý zo zástrčky a nemá žiadne iné elektrické pripojenie prostredníctvom mikro-USB kábla.
- Nie je dovolené vykonávať zmeny na prístroji a príslušenstve.
- Ak prístroj spadol, bol vystavený extrémnej vlhkosti alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmie sa ďalej používať. V prípade pochybností kontaktujte zákaznicky servis alebo predajcu.

- Inhalátor IH 58 Kids sa smie používať iba s vhodnými rozprašovačmi a so zodpovedajúcim príslušenstvom Beurer. Použitie rozprašovačov a príslušenstva od iných výrobcov môže negatívne ovplyvniť účinnosť terapie a prípadne poškodiť prístroj.
- Prístroj a príslušenstvo uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Pozor

- Výpadok prúdu, náhle poruchy, príp. iné nevhodné podmienky môžu mať za následok nefunkčnosť prístroja. Z toho dôvodu odporúčame, aby ste disponovali náhradným prístrojom, príp. liečivom (schválenným lekárom).
- Ak je potrebné použiť adaptér alebo predlžovací kábel, tieto musia zodpovedať platným bezpečnostným predpisom. Hranica prúdového výkonu a hranica maximálneho výkonu uvedená na adaptéri sa nesmie prekročiť.
- Prístroj a napájací kábel sa nesmú uchovávať v blízkosti tepelných zdrojov.
- Prístroj sa nesmie používať v miestnostiach, v ktorých sa predtým používali spreje. Pred začiatkom terapie sa tieto priestory musia vyvetrať.
- Prístroj nikdy nepoužívajte, ak vydáva nezvyčajné zvuky.
- Z hygienických dôvodov je bezpodmienečne potrebné, aby každý používateľ používal vlastné príslušenstvo.
- Sieťový adaptér vytriahnite vždy po použití z prístroja.
- Prístroj uchovávať na mieste, ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi. Prístroj sa musí uchovávať v stanovených okolitých podmienkach.

Všeobecné upozornenia

Pozor

- Prístroj používajte výlučne:
 - na ľudoch,
 - na účel, na ktorý bol vyvinutý (inhalácia aerosólu) a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie.
- **Každé nesprávne použitie môže byť nebezpečné!**
- V akútnych núdzových prípadoch má prvá pomoc prednosť.
- Okrem liečiv používajte iba destilovanú vodu, resp. roztok kuchynskej soli. Iné kvapaliny môžu za určitých

okolností spôsobíť poruchu inhalátora, resp. rozprašovača.

- Tento prístroj nie je určený na komerčné alebo klinické použitie, ale výlučne na osobné použitie v domácnosti!

Pred uvedením do prevádzky

⚠ Pozor

- Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
- Chráňte prístroj pred prachom, nečistotami a vlhkosťou a v žiadnom prípade ho počas prevádzky nezakrývajte.
- Nepoužívajte prístroj vo veľmi prašnom prostredí.
- Prístroj okamžite vypnite, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy pri jeho prevádzke.
- Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.


Oprava

i Upozornenie


- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.
- Prístroj nevyžaduje údržbu.
- Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

4. Popis prístroja a príslušenstva

Prehľad inhalátora

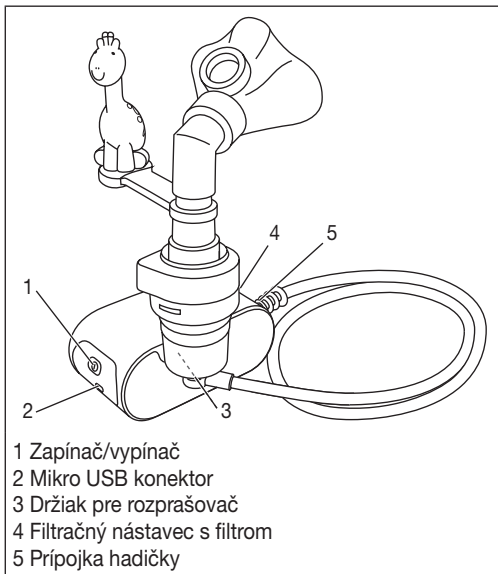

Prehľad rozprašovača a príslušenstva

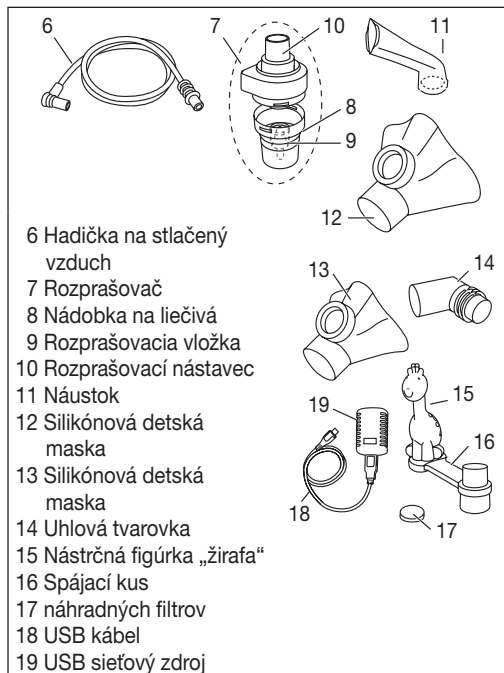

i Upozornenie

IH 58 Kids môžu používať aj dospelí. Dospelí majú možnosť vo svojom inhalátore osobitné príslušenstvo (obsahuje náustok, nosový nadstavec, masku pre dospelých, detskú masku, rozprašovač, hadičku na stlačený vzduch, filter). Toto nie je súčasťou balenia IH 58 Kids [n/a]. Príslušné použitie nosového nadstavca atď. je však napriek tomu ďalej popísané. Prehľad všetkých dokúpiteľných položiek nájdete v kapitole „12. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu“.

5. Uvedenie do prevádzky

Umiestnenie

Vyberte prístroj z obalu.

Postavte prístroj na rovny povrch.

Pred prvým použitím


i Upozornenie

- Pred prvým použitím by sa mali rozprašovač a príslušenstvo vyčistiť a vydezinfikovať. Pozri „Čistenie a dezinfekcia“ strana 20.


Spojovací prvok [16] s odnímateľnou nástrčnou figúrkou „žirafa“ [15] sa môže voliteľne zasunúť na rozprašovač.

Pri upevňovaní rozprašovača v kombinácii so spojovacím prvkom [16] a odnímateľnou nástrčnou figúrkou „žirafa“ [15] na prístroj dbajte o to, aby bolo ťažisko nad prístrojom. Inak hrozí, že sa prístroj preklopí. Ako príklad slúži titulný obrázok tohto návodu na použitie.

- Zasuňte hadičku na stlačený vzduch [6] smerom nadol do nádobky na liečivá [8].

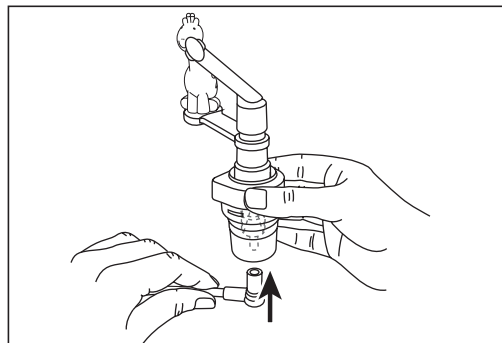

- Druhý koniec hadičky [6] za mierneho otáčania zasuňte do prípojky hadičky [5] na inhalátore.

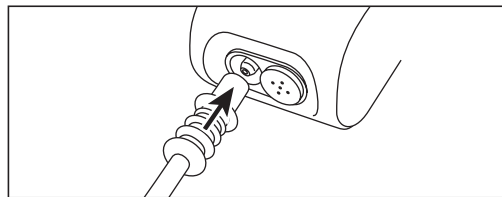

Zapnutie inhalátora

Na zapnutie inhalátora postupujte nasledovne:

- Mikro-USB kábel, ktorý je priložený k výrobku zasuňte do mikro-USB prípojky inhalátora. Druhý koniec mikro USB kábla zapojte do USB konektora sieťového adaptéra a adaptér zasuňte do zásuvky.
- Stlačte na inhalátore tlačidlo ZAP/VYP. Tlačidlo ZAP/VYP sa rozsvieti namodro. Inhalátor je v prevádzke.

6. Obsluha



Pozor


- Z hygienických dôvodov je bezpodmienečne potrebné rozprašovač [7] a príslušenstvo po každej terapii vyčistiť a po poslednej terapii v daný deň aj vydezinfikovať.
- Časť príslušenstva smie používať iba jedna osoba, neodporúčame použitie viacerými osobami.
- Ak sa majú v rámci terapie inhalovať rôzne liečivá za sebou, potom je potrebné dbať na to, že rozprašovač [7] sa musí po každej aplikácii prepláchnuť teplou vodou z vodovodu. Pozri „Čistenie a dezinfekcia“ na strane 20.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa výmeny filtra uvedené v tomto návode na použitie!
- Pred každým použitím prístroja skontrolujte pevné upevnenie prípojok hadičky na inhalátore [5] a rozprašovači [7].
- Pred použitím skontrolujte riadnu funkčnosť prístroja; za týmto účelom inhalátor (spolu s pripojeným rozprašovačom, no bez liečiv) nakrátko zapnite. Ak pritom vychádza z rozprašovača [7] vzduch, potom prístroj funguje.

6.1 Nasadenie rozprašovacej vložky

- Otvorte rozprašovač [7] otáčaním vrchného dielu proti smeru hodinových ručičiek vo vzťahu k nádobke na liečivá [8]. Vložte rozprašovaciu vložku [9] do nádobky na liečivá [8].
- Uistite sa, že kužel na vedenie liečiv dobre dolieha ku kuželu na vedenie vzduchu vnútri rozprašovača.
- Uistite sa, že je rozprašovací nástavec [10] umiestnený na hornej časti rozprašovača.

6.2 Plnenie rozprašovača

- Nalejte izotonický roztok kuchynskej soli alebo liečivo priamo do nádoby na liečivá [8]. Predchádzajte preplneniu! Maximálne odporúčané množstvo je 6 ml!
- Liečivá používajte iba na pokyn vášho lekára a spýtajte sa na dobu inhalácie a množstvo, ktoré je pre vás vhodné!
- V prípade, že je stanovené množstvo liečiva menšie ako 2 ml, doplníte ho o izotonický roztok kuchynskej soli na min. 2 ml. Zriadenie je taktiež potrebné v prípade hustých liečiv. Aj v tomto prípade dodržiavajte pokyny lekára.

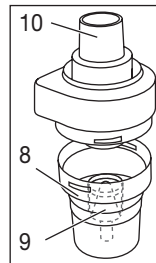

6.3 Zatvorenie rozprašovača

- Zatvorte rozprašovač [7] otáčaním vrchného dielu v smere hodinových ručičiek vo vzťahu k nádobke na liečivá [8]. Dbajte na správne spojenie!

6.4 Spojenie príslušenstva s rozprašovačom

- Rozprašovač [7] spojte s požadovaným príslušenstvom. Náustok [11] alebo nosový nadstavec [n/a] sa môžu nasadiť pomocou rozprašovacieho nástavca [10]. Detská maska [12] a maska pre bábätká [13] sa musia na rozprašovač nasadiť pomocou uhlovej tvárovky [14].



Upozornenie

Inhalácia prostredníctvom náustku je najúčinnější forma terapie. Použitie inhalácie cez masku sa odporúča iba vtedy, ak použítie náustku nie je možné (napr. pri deťoch, ktoré ešte nedokážu inhalovať cez náustok). Pri inhalácii cez masku dbajte na to, aby maska dobre priliehala a oči zostali voľné.

- Pred ošetrením vyťahnite rozprašovač [7] smerom nahor z držiaka [3].
- Pomocou spínačom ZAP/VYP [1] spustíte inhalátor.
- Hmla vystupujúca z rozprašovača je znakom bezchybnej prevádzky.

6.5 Liečba

- Ošetrované bábätko, resp. malé dieťa podržte alebo posadte do čo najvzpriamenejšej polohy. Prístroj nepoužívajte, ak ošetrované bábätko, resp. malé dieťa leží.
- Staršie deti a dospelí majú počas inhalácie sedieť vzpriamene a uvoľnene za stolom a nie v kresle, aby dýchacie cesty neboli stlačené, čo by negatívne ovplyvnilo účinnosť terapie.
- Zhlboka vdychujte rozprašené liečivo.

Pozor

Prístroj nie je vhodný na trvalú prevádzku, po 30 minútach prevádzky sa musí na 30 minút vypnúť.

Upozornenie

Počas terapie držte rozprašovač rovno (zvisle), pretože v opačnom prípade nebude fungovať rozprašovanie a nebude zabezpečená bezchybná funkčnosť prístroja. V závislosti od stavu nabitia akumulátora a použitého príslušenstva sa môže uvedený čas inštalácie líšiť.

Pozor

Éterické oleje liečivých rastlín, sirupy proti kašľu, roztoky na kloktanie, kvapky na natieranie alebo parné kúpele sú zásadne nevhodné na inhaláciu pomocou inhalátorov. Tieto prísady sú často husté a môžu negatívne ovplyvniť správnu funkčnosť prístroja, a tým aj účinnosť aplikácie. V prípade precitlivosti preduškového systému môžu liečivá s éterickými olejmi za určitých okolností vyvolať akútny bronchospazmus (náhle krčovitú zúženie priedušiek spojené s dýchavičnosťou). Informujte sa u vášho lekára alebo lekárničky!

6.6 Ukončenie inhalácie

V prípade, že hmla vystupuje už iba nepravidelne alebo sa zmenil zvuk pri inhalácii, môžete ukončiť terapiu.

- Po terapii inhalátor vypnite spínačom ZAP/VYP [1] a odpojte ho od elektrickej siete.
- Po terapii rozprašovač [7] vložte späť do držiaka [3].

6.7 Čistenie

Pozri „Čistenie a dezinfekcia“ na str. 20.

7. Výmena filtra

Pri normálnych podmienkach použitia sa vzduchový filter musí vymeniť po cca 100 prevádzkových hodinách resp. po jednom roku. Vzduchový filter pravidelne kontrolujte (po 10 – 12 rozprašovacích cykloch). Ak je veľmi znečistený alebo upchatý, potom použitý filter vymeňte. Ak filter navlhol, musí sa taktiež vymeniť za nový.

Pozor


- Nepokúšajte sa použitý filter vyčistiť a opäť použiť!
- Používajte výlučne originálne filtre od výrobcu, pretože inhalátor by sa inak mohol poškodiť alebo by nezabezpečoval dostatočne efektívnu terapiu.
- Vzduchový filter sa nesmie opravovať alebo udržiavať, ak sa práve používa.
- Prístroj nikdy neprevádzkujte bez filtra.

Pri výmene filtra postupujte nasledovne:

Pozor

- Prístroj najskôr vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Nechajte prístroj vychladnúť.

1. Filtračný nástavec [4] vytiahnite smerom nahor.

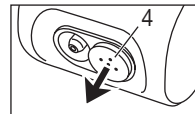

Upozornenie

V prípade, že filter po stiahnutí uzáveru zostane v prístroji, odstráňte ho z prístroja napr. pinzetou a pod.

2. Vložte uzáver filtra [4] s novým filtrom.
3. Skontrolujte jeho upevnenie.

8. Čistenie a dezinfekcia

Rozprašovač a príslušenstvo

VÝSTRAHA

Dodržujte nasledovné hygienické predpisy, aby ste predišli ohrozeniu zdravia.


- Rozprašovač [7] a príslušenstvo sú určené na opakované použitie. Dbajte, prosím, na to, že v prípade rôznych oblastí použitia sú kladené rôzne požiadavky na čistenie a opätovnú hygienickú prípravu.

Upozornenia:

- Mechanické čistenie rozprašovača a príslušenstva pomocou kefy alebo podobných nástrojov je zakázané, pretože môže mať za následok neopraviteľné poškodenie prístroja a znemožnenie úspešného cieľného ošetrovania.
- O doplnkových požiadavkách týkajúcich sa nevyhnutnej hygienickej prípravy (starostlivosť o ruky, manipulácia s liečivami, príp. inhalačnými roztokmi) v prípade veľmi rizikových skupín (napr. pacienti s cystickou fibrózou) sa poraďte so svojím lekárom.
- Dbajte na dostatočné vysušenie po každom čistení, dezinfekcii. Zvyšková vlhkosť, resp. zvyšková voda môže mať za následok zvýšené riziko rozmnožovania choroboplodných zárodkov.

Príprava

- Hneď po každej terapii sa musia všetky časti rozprašovača [7] a použité príslušenstvo očistiť od zvyškov liečiv a nečistôt.
- Z rozprašovača vyťahnite náustok [11], masku [12, 13] alebo nosový nadstavec [n/a].
- Rozoberte nosový nadstavec [n/a], ak ste ho používali v kombinácii s komfortným nadstavcom.
- Stiahnite masky [12, 13] z uhlovej tvarovky [14].
- Rozoberte rozprašovač [7] otáčaním vrchného dielu proti smeru hodinových ručičiek proti nádobke na liečivá [8].
- Odstráňte rozprašovací vložku [9] z nádobky na liečivá [8]. Snímate rozprašovací nástavec [10].
- Zloženie prístroja sa vykonáva analogicky v opačnom poradí.

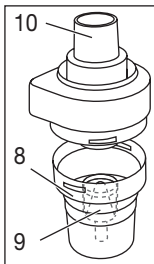

Čistenie

⚠️ Pozor

Pred každým čistením sa prístroj musí vypnúť, odpojiť od elektrickej siete a nechať vychladnúť.

Rozprašovač a použité **príslušenstvo**, ako napr. náustok, maska a pod., sa po každom použití musia vyčistiť horúcou, neviacou vodou. Diely dôkladne vysušte jemnou utierkou. Po kompletnom vyschnutí všetky diely opäť zložte, vložte ich do suchej, utesnenej nádoby a vykonajte dezinfekciu.

Pri čistení sa uistite, že boli odstránené všetky zvyšky. Nepoužívajte žiadne látky, ktoré môžu byť pri kontakte s pokožkou alebo sliznicami, prehltnutí alebo vdýchnutí potenciálne jedovaté.

Na čistenie **prístroja** používajte mäkkú, suchú utierku a neabrazívny čistiaci prostriedok.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a prístroj nikdy neponárajte do vody.

⚠️ Pozor

- Dbajte na to, aby sa dovnútra prístroja nedostala žiadna voda!
- Prístroj a príslušenstvo neumývajte v umývačke riadu!
- Prístroja sa nesmiete dotýkať vlhkými rukami, ak je zapojený do siete. Na prístroj nesmie striekať voda. Prístroj sa smie používať iba úplne suchý.
- Vniknutá kvapalina môže spôsobiť poškodenie elektrického vybavenia a ďalších dielov inhalátora a znefunkčnúť prístroj.

Kondenzovaná voda, starostlivosť o hadičku

V závislosti od okolitých podmienok sa v hadičke môže zbierať kondenzovaná voda. Aby ste predišli rozmnožovaniu choroboplodných zárodkov a aby bola zabezpečená bezproblémová terapia, musí sa bezpodmienečne odstrániť vlhkosť. Postupujte, prosím, nasledovne:

- Hadičku na stlačený vzduch [6] vyťahnite z rozprašovača [7].
- Na strane inhalátora [5] nechajte hadičku zasunutú.
- Zapnite inhalátor a nechajte ho v prevádzke dovtedy, kým prúdici vzduch neodstráni vlhkosť.
- V prípade silného znečistenia hadičku vymeňte.

Dezinfekcia

Pri dezinfekcii rozprašovača a príslušenstva, prosím, postupujte presne podľa nižšie uvedených bodov. Jednotlivé diely odporúčame dezinfikovať najneskôr po poslednom použití v daný deň.

(Potrebujete na to iba trochu bezfarebného octu a destilovanú vodu!)

- Rozprašovač a príslušenstvo najskôr vyčistíte spôsobom popísaným v bode „Čistenie“.
- Rozložený rozprašovač [7], náustok [11], silikónové masky [12, 13] a rozložený nosový nadstavec [n/a] položte na 5 minút do vriacej vody.
- Na ostatné príslušenstvo použite octovú zmes pozostávajúcu z ¼ octu a ¾ destilovanej vody. Uistite sa, že je dané množstvo dostatočné a že sa do neho dajú kompletne ponoriť diely, ako PVC masky [n/a] a hadička [6]. Vyvárateľné diely príslušenstva sa takisto môžu týmto spôsobom dezinfikovať.
- Ponechajte tieto diely 30 minút v octovej zmesi.
- Diely vypláchnite vodou a dôkladne ich vysušte jemnou utierkou.

Pozor

Hadíčku na stlačený vzduch a masky [n/a] nevyvárajte ani nesterilizujte v pare.

- Po kompletnom vyschnutí všetky tieto diely opäť zložte, vložte ich do suchej, utesnenej nádoby.

Upozornenie

- Dbajte na to, aby po čistení boli všetky diely kompletne suché, pretože v opačnom prípade hrozí riziko rozmnožovania choroboplodných zárodkov.
- Roztok na studenú dezinfekciu používajte podľa pokynov výrobcu.

Sušenie

- Jednotlivé diely položte na suchú, čistú a savú podložku a nechajte ich kompletne vyschnúť (minimálne 4 hodiny).

Odolnosť materiálu

- Rozprašovač a príslušenstvo pri častom používaní a opätovnej hygienickej príprave podliehajú, tak ako všetky plastové diely, určitému opotrebovaniu. To môže po čase spôsobiť zmenu aerosólu, a tým aj obmedzenie účinnosti terapie. Rozprašovač a ďalšie príslušenstvo preto odporúčame vymeniť najneskôr po roku.

- Pri výbere čistiacich, príp. dezinfekčných prostriedkov je potrebné dbať na nasledovné: Používajte iba jemný čistiaci alebo dezinfekčný prostriedok, ktorý dávkuje podľa údajov výrobcu.

Uskladnenie

- Neskladujte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa) a neprepravujte s vlhkými predmetmi.
- Pri skladovaní a preprave chráňte prístroj pred pretrvávajúcimi priamym slnečným žiarením.
- Časti príslušenstva je možné bezpečne uschovať do priehradky na príslušenstvo. Prístroj uchovávajte na suchom mieste, najlepšie v originálnom obale.

9. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES 

o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – **WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.


10. Riešenie problémov

Problémy/ otázky	Možná príčina/odstránenie
Rozprašovač nevytvára aerosól alebo ho tvorí málo.	1. Príliš veľa alebo príliš málo liečiva v rozprašovači. Minimum: 2 ml, Maximum: 6 ml
	2. Skontrolujte, či dýza nie je upchatá. Dýzu prípadne vyčistite (napr. vypláchnutím). Rozprašovač následne opäť uveďte do prevádzky. POZOR: jemné otvory prepichujte opatrne iba zo spodnej strany dýzy.
	3. Rozprašovač nie je držaný zvislo.
	4. Bolo použité nevhodné kvapalné liečivo na rozprašovanie (napr. príliš husté). Kvapalné liečivo by mal určiť lekár.

Problémy/ otázky	Možná príčina/odstránenie
Množstvo vystupujúcej hmly je príliš malé.	Zlomená hadička, upchatý filter, príliš veľa inhalačného roztoku.
Ktoré liečivo je možné inhalovať?	Spýtajte sa svojho lekára. V zásade je možné inhalovať všetky liečivá, ktoré sú vhodné a schválené na prístrojovú inhaláciu.
V rozprašo- vači zostáva inhalačný roztok.	Toto je podmienené technicky a normálne. Inhaláciu ukončíte hneď, keď začujete výrazne zmenený zvuk rozprašovača.
Na čo je potrebné dbať pri bábätkách a malých deťoch?	1. Pri bábätkách a malých deťoch by maska mala zakrývať ústa a nos, aby bola zabezpečená efektívna inhalácia.
	2. Pri deťoch by maska mala taktiež zakrývať ústa a nos. Rozprašo- vanie vedľa spiacich osôb nemá veľký význam, pretože v takom prípade nemôže do pľúc preniknúť dostatočné množstvo liečiva.
	Upozornenie: Inhalácia by sa mala vykonávať iba pod dozorom a s po- mocou dospeléj osoby a dieťa by sa nemalo nechávať samotné.

Problémy/ otázky	Možná príčina/odstránenie
Prečo sa má rozprašovač pravidelne meniť?	Existujú dva dôvody: 1. Aby bolo dosiahnuté terapeuticky účinné spektrum častí, nemal by otvor dýzy prekročiť určitý pri- emer. Na základe mechanického a tepelného namáhania podlieha plast určitému opotrebovaniu. Rozprašovací vložka [9] je ob- zvlášť citlivá. Tým sa môže zmeniť aj zloženie kvapiek aerosólu, čo bezprostredne ovplyvňuje efektív- nosť terapie. 2. Okrem toho sa pravidelná výmena rozprašovača odporúča z hygie- nických dôvodov.
Potrebuje každá osoba vlastný roz- prašovač?	Z hygienického hľadiska je to bez- podmienečne potrebné.

11. Technické údaje


Model	IH 58 Kids
Typ	IH 58
Rozmery (Š × V × H)	110 × 62 × 47 mm
Hmotnosť	176 g
Pracovný tlak	cca 0,25 – 0,5 barov
Objem rozprašovača	min. 2 ml max. 6 ml
Prietok liečiva	cca 0,25 ml/min
Akustický tlak	max. 45 dBA (podľa DIN EN 13544-1 odsek 26)
Elektrické pripojenie	Vstup: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; 0,5 A Výstup: 5 V  ; 2 A
Predpokladaná životnosť	400 h
Prevádzkové podmienky	Teplota: +10 °C až +40 °C Relatívna vlhkosť vzduchu: 10 % až 95 % Okolitý tlak: 700 až 1060 hPa

Prepravné a skladovacie podmienky	Teplota: -20 °C až +60 °C Relatívna vlhkosť vzduchu: 10 % až 95 % Okolitý tlak: 700 až 1060 hPa
Vlastnosti aerosólu	1) Dávka aerosólu: 0,15 ml 2) Účinnosť dávky aerosólu: 0,03 ml/min 3) Veľkosť častíc (MMAD): 4,12 µm

Sériové číslo sa nachádza na zariadení alebo v priehradke na batérie.

Technické zmeny vyhradené.

Graf veľkosti častíc

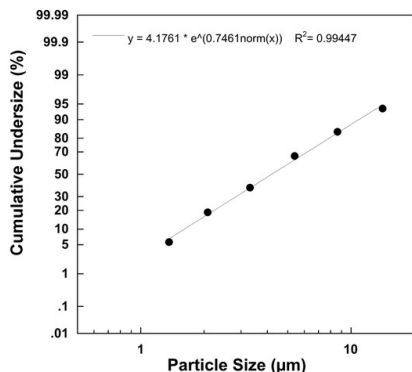

Merania boli vykonané s roztokom fluoridu sodného a zariadením „Next Generation Impactor“ (NGI).

Graf preto pravdepodobne nie je možné použiť na suspenzie alebo veľmi tuhé liečivo. Bližšie informácie sa dozviete od príslušného výrobcu liečiva.

12. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Označenie	Materiál	REF
Yearpack IH 58 Kids (obsahuje náustok, silikónovú masku pre bábätká, silikónovú detskú masku, rozprašovač, hadičku na stlačený vzduch, filter)	PP/PVC/ silikón	602.18

Označenie	Materiál	REF
Yearpack IH 58 Standard (obsahuje náustok, nosový nastavac, masku pre dospelých, detskú masku, rozprašovač, hadičku na stlačený vzduch, filter)	PP/PVC	602.15
Detská maska	PVC	601.31
Nástrčná figurka „žirafa“	PP/PVC	164.182

i Upozornenie

Pri použití prístroja mimo jeho špecifikácie nie je zaručená jeho bezchybná funkcia! Vyhradujeme si právo na technické zmeny s cieľom zlepšovania a ďalšieho vývoja výrobku. Tento prístroj a jeho príslušenstvo zodpovedá európskym normám EN60601-1 a EN60601-1-2 (CISPR 11, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-7, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11) a EN13544-1 a podlieha osobitným opatreniam s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu. Tento prístroj je v súlade so smernicou EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC a zákonom o zdravotníckych výrobkoch.

INFORMÁCIE O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE

- Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých prostrediach uvedených v tomto návode na použitie, vrátane domáceho prostredia.
- V prítomnosti elektromagnetického rušenia môže byť prístroj za určitých okolností používaný iba v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť napr. chybové hlásenia alebo porucha displeja/prístroja.
- Treba sa vyhnúť tomu, aby sa tento prístroj používal bezprostredne vedľa iných prístrojov alebo s ďalšími prístrojmi na sebe, pretože to môže mať za následok chybný spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné používať ho popísaným spôsobom, tento prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa presvedčili, že fungujú správne.
- Použitím iného príslušenstva ako toho, ktoré stanovil alebo zabezpečil výrobca tohto prístroja, môže mať za následok zvýšené rušivé elektromagnetické vyžarovanie.

nie alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť zariadenia a môže viesť k chybnému spôsobu prevádzky.

13. Záruka/servis

Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté. Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 5 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia. Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné.

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť

- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
- originálny výrobok spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené

- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebojú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);
- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;
- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.

